



SANOMED 102

Krční límec kuličkový

Kuličkový krční límec slouží k měkké opoře a částečnému odlehčení krční páteře.



Návod k použití – krční límec typ 102

Děkujeme, že jste si vybrali náš krční límec.

Tento návod vám pomůže límec správně používat.

Informace o účelu použití

Krční límec slouží k dočasnému znehybnění krční páteře. Je vhodný k použití i v noci.

Indikace:

bolesti krční páteře, doléčení po úrazech a operacích krční páteře, odlehčení krční páteře, doplněk fyzikální terapie

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím límce si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Ověřte, že máte správnou velikost.
- Výška límce by měla umožnit pohodlnou oporu brady.

Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je límec čistý a nepoškozený. Vhodnou velikost vyberte pomocí tabulky velikostí. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

Nasazení:

1. Límec umístěte kolem krku tak, aby byl suchý zip v zadní části krku.
2. Zadní část límce obepne krk zezadu.
3. Upevněte límec pomocí suchého zipu v zadní části.
4. Límec by měl být pohodlný - neměl by omezovat dýchání ani polykání.
5. Límec je naplněn kuličkovou výplní, můžete si přesunem kuliček určit nejvhodnější výšku límce.
6. Límec noste po dobu doporučenou lékařem.

Odložení límce:

- Chcete-li límec odložit, rozepněte suché zipy a sejměte jej.
- Pak zipy pro delší životnost bandáže zapněte.

Údržba a čištění:

- Límec je plněný kuličkovou výplní a opatřen bavlněným potahem.
- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme síťku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na vnitřní etiketě na horním okraji produktu.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Skladování

Bandáž skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabráňte deformaci ortézy tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.



SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída 240/75
612 00 Brno
Czechia



Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
BA, PES

Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.