

# Sanomed®

## Sanomed - 401 Bederní pás

Bederní pás určený k podpoře a stabilizaci  
bederní páteře.



[www.sanomed.cz](http://www.sanomed.cz)



# Návod k použití - pás 401

Děkujeme, že jste si vybrali náš bederní pás.

Tento návod vám pomůže pás správně používat.

## Informace o účelu použití

Pás je určen k podpoře a stabilizaci bederní páteře, úlevě od bolesti zad při fyzické zátěži nebo dlouhodobém sezení, použití při lehkých bolestech zad, svalovém přetížení nebo jako prevence při práci a sportu, nošení při lehkých potížích, kdy není nutná vysoká opora.

**Indikace:** akutní a chronické bolesti zad, diskopatie, spondylolistéza, degenerativní onemocnění páteře.

## Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

## Před použitím pásu si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte pás na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte pás používat a poraďte se s lékařem.

## Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je pás čistý a nepoškozený. Pás používejte na tenké prádlo nebo přímo na tělo. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

## Nasazení:

- Zkontrolujte, zda je pás suchý a čistý.
- Umístěte pás na záda tak, aby výztuhy byly umístěny ve středu zad.
- Levou a pravou stranu pásu rovnoměrně táhněte dopředu a na břicho je spolu zapněte.
- Oba konce dotahovacích pásků rovnoměrně táhněte a na břicho dle požadované komprese zapněte, zajistíte tak pevné a stabilní přilnutí
- Pás by neměl omezovat dýchání ani pohyb.

## Odložení pásu:

- Rozepněte suché zipy a sejměte pás.
- Zapněte suché zipy pro delší životnost pásu.


## Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme sítku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

## Skladování

Pás skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci pásu tím, že jej nebudete skládat nebo přetěžovat.



 <p>SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia</p>	<p><b>MD</b> Medical Device (Zdravotnický prostředek)</p> <p>Materiálové složení: BA, PE, PES</p>	<p><b>Ohlašovací povinnost:</b> Závazné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobcí a příslušnému úřadu členského státu.</p>
---	---	--