



Sanomed - 401

Bederní pás

Bederní pás určený k podpoře a stabilizaci
bederní páteře.



Návod k použití - pás 401

Děkujeme, že jste si vybrali náš bederní pás.

Tento návod vám pomůže pás správně používat.

Informace o účelu použití

Pás je určen k podpoře a stabilizaci bederní páteře, úlevě od bolesti zad při fyzické zátěži nebo dlouhodobém sezení, použití při lehkých bolestech zad, svalovém přetížení nebo jako prevence při práci a sportu, nošení při lehkých potížích, kdy není nutná vysoká opora.

Indikace: akutní a chronické bolesti zad, diskopatie, spondylolistéza, degenerativní onemocnění páteře.

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím pásu si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte pás na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte pás používat a poraďte se s lékařem.

Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je pás čistý a nepoškozený. Pás používejte na tenké prádlo nebo přímo na tělo. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

Nasazení:

- Zkontrolujte, zda je pás suchý a čistý.
- Umístěte pás na záda tak, aby výztuhy byly umístěny ve středu zad.
- Levou a pravou stranu pásu rovnoměrně táhněte dopředu a na břicho je spolu zapněte.
- Oba konce dotahovacích pásků rovnoměrně táhněte a na břicho dle požadované komprese zapněte, zajistěte tak pevně a stabilní přilnutí
- Pás by neměl omezovat dýchání ani pohyb.

Odložení pásu:


- Rozepněte suché zipy a sejměte pás.
- Zapněte suché zipy pro delší životnost pásu.

Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme sítku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na vnitřní etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Skladování

Pás skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci pásu tím, že jej nebudete skládat nebo přetěžovat.

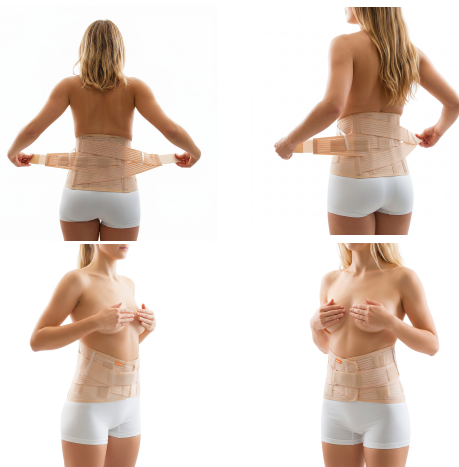

SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída 240/75
612 00 Brno
Česko



Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
BA, PE, PES

Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.