

MEYRA[®]
medical

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Rush
Qmed[®]
TO MAKE YOUR LIFE EASIER

POOPERAČNÍ KOLENNÍ ORTÉZA S KLOUBEM

KATALOGOVÉ ČÍSLO DRQ10N



Indikace:

Stavy, které vyžadují imobilizaci nebo kontrolu rozsahu pohybu kolena po operacích nebo úrazech. Léčba a další léčba poranění kolenního kloubu a měkkých tkání. Výrobek byl vytvořen tak, aby splňoval požadavky běžného procesu ochrany kolena a rehabilitace po operaci. Použití kompresního chladicího gelu dokonale odpovídá protokolu „P.R.I.C.E.“.

* P.R.I.C.E. - Zkratka pro anglická slova: Protect (ochrana), Recovery (uzdravení), Ice (led, chlad), Compression (komprese), Elevation (elevace). Postup k prevenci nebo eliminaci infekce a otoku, které mohou negativně ovlivnit proces hojení poškozeného nebo zraněného kloubu.

Kontraindikace:

Stavy vyžadující absolutní imobilizaci končetiny. Intraartikulární zlomeniny, zlomeniny holenní, lýtkové a stehenní kosti.

POZOR!

Ortéz je měla být používána vždy podle pokynů lékaře nebo fyzioterapeuta. Při prvním použití by měl ortéz nasadit a přizpůsobit vaší potřebě kvalifikovaný zdravotnický personál. Úhlový rozsah pohybu by měl být nastaven podle pokynů lékaře. Před použitím ortézy si pečlivě přečtěte uživatelskou příručku. Pokud při nošení ortézy cítíte nepohodlí, pozorujete otoky nebo podráždění kůže, okamžitě kontaktujte lékaře nebo fyzioterapeuta.

Pokyny pro aplikaci:

Ortéz je zpočátku nastavena na 0°, délka ortézy je 49 cm. Pro zajištění správné stabilizace kolena je nezbytné optimální nastavení ortézy kvalifikovaným zdravotnickým personálem.

1. Vyjměte ortéz z balení.
2. Uvolněte všech pět zapínání.
3. Uchopte klouby ortézy a upravte podpěry na požadovanou šířku. Obr. 1
4. Umístěte ortéz na rovný povrch pod pacientovu končetinu tak, aby byly podpěry přibližně symetricky na obou stranách.
5. Každá podpěra má 5 průchodek. Stiskněte tlačítko uprostřed průchodky, uchopte ji a natáhněte na požadovanou délku. Opakujte postup pro každý posuvník. Obr. 2
6. Uchopte přezky a natáhněte tak, aby byla délka pásků v zadní části ortézy upravena, jak je znázorněno. Obr. 3
7. Odstraňte ochranné lepenkové vložky na pravých sponkách. Obr. 4
8. Nejprve zapněte spony nejbližší ke kolennímu kloubu a poté koleno oviňte páskem a přiměřeně utáhněte. Ujistěte se, že se střed kloubů překrývá se středem kolena. Obr. 5
9. Zapněte zbývající spony a pomocí vhodné kompresní síly oviňte pásy. Délka pásků může být nastavena dle obrázku. Obr. 6
10. Ujistěte se, že je ortéz správně nasazena. Varování! Pokud zjistíte, že musíte ortéz prodloužit nebo zkrátit, rozepněte sponu ve vybrané oblasti a přesuňte poutka do požadované polohy.
11. Chcete-li nastavit požadovaný rozsah pohybu v kloubu, uvolněte Quick Lock (c). Zámky umožňují fixaci ortézy v úhlech 0°, 15°, 30°, 45°. Obr. 7

12. Stiskněte a posuňte zámky: flexe (b) a extenze (a) pro nastavení požadovaného úhlu. Použijte svorky, aby nedošlo k neúmyslnému zablokování. Obr. 7.2

POZOR!



Pamatujte, že na obou stupnicích musí být nastaveny stejné hodnoty.
Balení by mělo obsahovat:

1. Ortéza
2. Chladicí sáček (volitelně)
3. Sada svorek
4. Pásek na čášku
5. Uživatelská příručka

Údržba:

Před praním odstraňte z podpěr polstrování. Polstrovací prvky a pásy perte ručně jemným čisticím prostředkem. Nechlórovat, nemýt chemicky, neprat, neždímat, před sušením jemně vymačkat. Sušit mimo umělé zdroje tepla. Nežehlit. Chraňte před zdroji ohně nebo přímým slunečním zářením.

POZOR!







Nedostatečná osobní hygiena nebo nesprávné použití čisticích prostředků může způsobit oděrky nebo jiné problémy související se zvýšeným pocením a vytvořením bakteriální flóry. Nepoužívejte hřejivé masti. Upozorňujeme, že nevymyté zbytky čisticích prostředků mohou způsobit podráždění pokožky a poškození materiálu, ze kterého byl výrobek vyroben.

Velikost:

Univerzální

KONEČNÉ ROZHODNUTÍ O APLIKACI A VÝBĚRU POMŮCKY BY MĚL UČINIT ODBORNÍK.

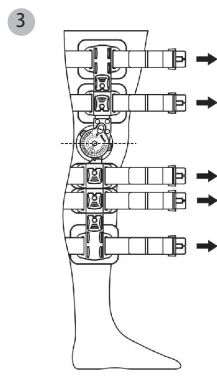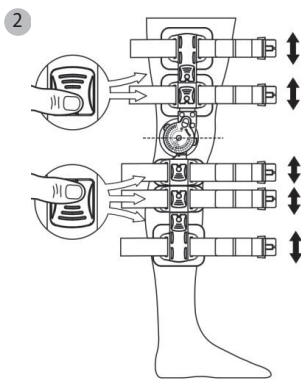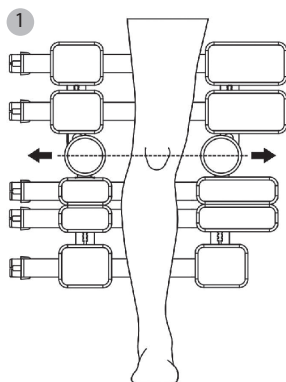

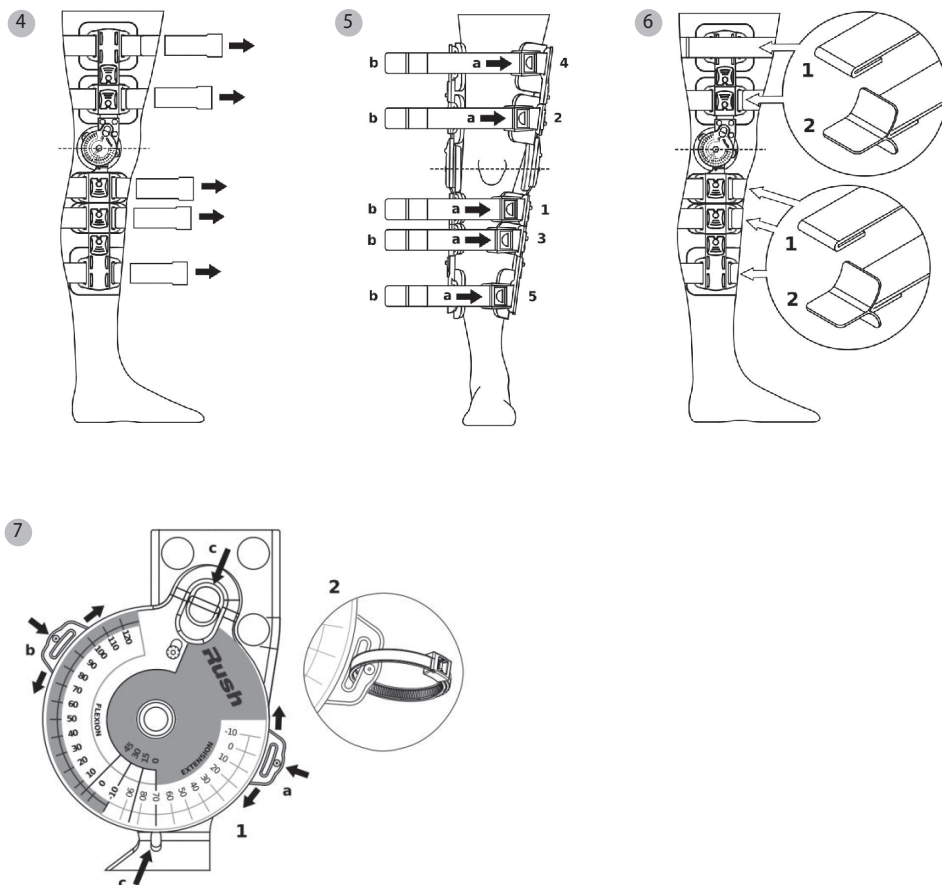

Vydání LM05-2017

Výrobce:

mdh sp. z o.o.
ul. Ks. W. Tymienieckiego 22/24
90-349 Łódź
tel. +48 42 674 83 84
fax. +48 42 676 71 85
www.mdh.pl, www.qmedinfo.pl



SPRZĘT
MEDYCZNY

Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4
Česká republika
www.meyra.cz