

# Sanomed®

## SANOMED epiSport

Loketní páska se silikonovou pelotou vyvíjí tlak v předloktí a tím snižuje tlak na šlachy loketního kloubu.



[www.sanomed.cz](http://www.sanomed.cz)



# Návod k použití epikondylární pásky epiSport

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž. Tento návod vám pomůže správně používat a udržovat pásku pro dosažení nejlepších výsledků.

## Informace o účelu použití

Tato epikondylární neoprenová páska se silikonovou pelotou vyvíjí cílený tlak na loketní šlachy, čímž podporuje stimulaci a maximalizuje úlevu od bolesti s proprioceptivním účinkem.

## Použití:

- aktivně odlehčuje a stabilizuje loket bez jeho omezení funkce
- poskytuje podporu a úlevu při sportovních a pracovních úrazech
- jednoduché zapínání na suchý zip umožňuje individuální nastavení komprese

## Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

## Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- nepoužívejte pásku na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku
- pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poraďte se s lékařem

## Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je páska čistá a nepoškozená.

## Nasazení:

- pásku je možné nosit na levé i pravé ruce
- rozepnutou páskou obepnete předloktí asi 4-6 cm pod loktem
- silikonová pelota by měla být umístěna v případě tenisového lokte na vnější straně předloktí (obrázek na přední straně)
- poté konec pásky provlečte očkem
- zapněte ruku v pěst a pásku utáhněte. Dbejte na to, aby se páska nepootočila a suchý zip zapněte.
- Páska by měla držet pevně, aniž by klouzala nebo se rozepínala.
- TIP: pokud už pásku umíte nasazovat, stačí ji rozepnout, a stáhnout přes předloktí a dlaň dolů bez kompletního rozepínání.

## Sundání pásky:

- rozepněte suchý zipy a sundejte pásku z ruky.
- pak zip pro delší životnost pásky zapněte.

## Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme síťku na praní.
- Zapněte suchý zip.
- Pásku nevystavujte přímému působení tepla a chladu.
- Respektujte pokyny k péči všíte na etiketě na produktu.
- Perte v ruce nebo pračce na 30°C.
- Používejte jemný prací prostředek.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

## Skladování:

Bandáž skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci ortězy tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.



SANOMED, spol. s r.o.  
Palackého třída 240/75  
612 00 Brno  
Czechia



Medical Device  
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:  
Neopren, silikon

## Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.