



manuSport **Bandáž zápěstí**

Poskytuje podporu a kompresi
zápěstí.



Návod k použití – manuSport

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž. Tento návod vám ji pomůže správně používat.

Účel použití

- Poskytuje pevnou podporu a kompresi zápěstí – ideální při přetížení, únavě nebo lehkých poraněních.
- Výrazně pomáhá při sportu nebo práci díky stabilizaci zápěstí.
- Díky univerzální velikosti lze použít pro pravé i levé zápěstí.

Je vhodná pro každodenní používání doma, v práci nebo při volnočasových aktivitách.

Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bandáž čistá a nepoškozená.

Nasazení

Vložení ruky

Vsuňte palec do tvorů. Bandáž mírně natáhněte a omotejte kolem zápěstí a zapnete suchý zip.

Úprava komprese

Požadovanou kompresi můžete regulovat natažením bandáže při zapínání.

Dbejte, aby bandáž měla požadovanou kompresi, ale nesmí škrtit ani omezovat krevní oběh.

Sundání bandáže:

Rozepněte suchý zipy a sejměte ji. Pak zipy pro delší životnost bandáže.

Údržba a čištění:

- Perte ručně ve vlažné vodě (max. 30°C) s jemným pracím prostředkem
- Neždímejte, nesušte v sušičce ani na přímém slunci.
- Nežehlete

Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci rovnací tím, že jej nebudete skládat nebo přetěžovat.



SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída
240/75 612 00 Brno
Czechia



Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
neopren

Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.