

# Sanomed®

## **SANOMED 424** **Kýlní pupeční pás**

Pás určený k fixaci a odlehčení při pupeční  
nebo břišní kýle.



# Návod na použití SANOMED 424

Děkujeme, že jste si vybrali náš kýlní pás. Tento návod vám jej pomůže správně používat.

## Informace o účelu použití:

- podpora a fixace v oblasti břišní stěny při pupeční kýle
- prevence zvětšování kýly
- používání po chirurgických zákrocích břišní stěny (dle doporučení lékaře)
- zpevnění oslabené břišní stěny při fyzické námaze.

## Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

## Před použitím pásu si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

Nepoužívejte pás na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku. Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poraďte se s lékařem.

## Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je pás čistý a nepoškozený. Vhodnou velikost vyberte pomocí tabulky velikostí. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

## Příprava:

Pás používejte nejlépe na tenké prádlo nebo přímo na tělo.

## Nasazení:

- obtočte pás kolem pasu tak, aby pelota byla umístěna na oblast pupku
- přední část pásu by měla být umístěna rovně přes oblast břicha

## Zapnutí:

- přitáhněte konce pásu rovnoměrně tak, aby byl zajištěn mírný tlak na kýlu, a zapněte suchý zip
- tlak nesmí způsobovat bolest ani omezovat dýchání

## Nošení:

- pás noste dle pokynů ošetřujícího lékaře, obvykle přes den při chůzi nebo fyzické námaze
- na noc se pás obvykle sundává, pokud lékař neurčí jinak.

## Upozornění:


- Pás není náhradou chirurgické léčby kýly, slouží jako podpůrná pomůcka.
- Nepoužívejte při otevřených ranách, zánětech kůže nebo alergii na materiál.
- Pokud cítíte bolest, tlak, mravenčení nebo zhoršení kýly, ihned pás sundejte a kontaktujte lékaře.
- Vždy používejte podle doporučení odborníka.

## Údržba a čištění:

- Perte ručně ve vlažné vodě (max. 30°C) s jemným pracím prostředkem
- Neždímejte, nesušte v sušičce ani na přímém slunci
- Nežehlete

## Skladování:

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci pásu tím, že jej nebudete skládat nebo přetěžovat.

 <p>SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia</p>	<p><b>MD</b> Medical Device (Zdravotnický prostředek)</p> <p>Materiálové složení: BA, PES</p>	<p><b>Ohlašovací povinnost:</b> Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.</p>
---	---	--