

# Sanomed®

## **SANOMED 338** **Prstová dlaha**

Dlaha pro fixaci prstů ruky



[www.sanomed.cz](http://www.sanomed.cz)



# Návod k použití – SANOMED 338

Děkujeme, že jste si vybrali naši prstovou ortézu. Tento návod vám ji pomůže správně používat.

## Informace o účelu použití:

Ortéza slouží k fixaci prstu v extenzi při zlomeninách, vyvrtnutí nebo jiných poraněních v oblasti prvního až třetího článku prstů ruky.

## Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

## Popis:

Tvarovatelný lehký kovový materiál, povrch je opatřen měkkou vystelkou pro zvýšení komfortu. Fixace: ortéza se standardně upevňuje obvazem nebo náplastí (není součástí dlahy).

## Před použitím ortézy si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte ortézu na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte ortézu používat a poraďte se s lékařem.

## Pokyny k nasazení ortézy:

1. Před použitím si důkladně umyjte a osušte ruku.
2. Ujistěte se, že prst čistý a suchý.
3. Vyberte vhodnou velikost dlahy.
4. Umístěte dlahu na postižený prst tak, aby podpírala celý prst.
5. Fixujte dlahu na prst pomocí obinadla nebo náplastí.
6. Zkontrolujte, že prst je v požadované poloze (lehce natažený), že nedochází k přílišnému tlaku na kůži nebo nehet.
7. Pokud je ortéza používána po zlomenině nebo chirurgickém zákroku, postupujte přesně podle pokynů ošetřujícího lékaře.

## Kontrola:

- Zkontrolujte, že prst je stabilizovaný a pohyb je omezen jen v potřebném rozsahu.
- Vyzkoušejte lehké pohyby ostatních prstů - neměly by být omezené.

## Upozornění:

- Používejte pouze podle pokynů lékaře.
- Nefixujte nadměrně – přílišné utažení může způsobit otlaky nebo poruchu prokrvení.
- Pravidelně kontrolujte stav pokožky pod ortézou. V případě zarudnutí nebo bolesti ortézu ihned sundejte a poraďte se s lékařem.
- Nepoužívejte poškozenou nebo deformovanou ortézu.

## Údržba a čištění:

- Ortézu otřete vlhkým hadříkem s jemným mýdlem nebo dezinfekčním prostředkem.
- Nepoužívejte bělidla, aviváže ani chemické čističe.
- Neždímejte, nesušte v sušičce, nežehlit.
- Sušte volně na vzduchu, mimo přímé sluneční záření nebo zdroj tepla.

## Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla.

## Velikosti jsou dostupné takto (délka x šířka):

**Velikost 1:** 65 × 25 mm, hmotnost cca 6 g

**Velikost 2:** 80 × 25 mm, hmotnost cca 9 g

**Velikost 3:** 95 × 25 mm — hmotnost cca 10 g

Volbu velikosti zvolte podle délky poraněného úseku prstu a požadované úrovně fixace.



SANOMED, spol. s r.o.  
Palackého třída  
240/75 612 00 Brno  
Czechia



Medical Device  
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení: polyuretan,  
hliník

## Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.