

Sanomed®

LumboSan Bederní pás

Bederní pás se čtyřmi anatomicky tvarovanými
dlahami.



www.sanomed.cz



Návod k použití - bederní pás LumboSan

Děkujeme, že jste si vybrali náš bederní pás. Tento návod vám pomůže správně používat a udržovat váš bederní pás pro dosažení nejlepších výsledků.

Informace o účelu použití

Lumbosan je ortéza ke stabilizaci bederní páteře.

Indikace: akutní i chronické bolesti zad, diskopatie, spondylolistéza, degenerativní změny páteře, lumbalgie při svalové nedostatečnosti, symfyzeolýza, funkční poruchy páteře, poúrazové stavy, bolesti při osteoporóze

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím bederního pásu si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte bederní pás na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bederní pás používat a poraďte se s lékařem.

Pokyny k nasazení / sundání:

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bandáž čistá a nepoškozená. Vhodnou velikost vyberte pomocí tabulky velikostí. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

Nasazení:

1. Zkontrolujte, zda je pás suchý a čistý.
2. Ujistěte se, že máte správnou velikost.
3. Umístěte pás na záda tak, aby výztuhy byly umístěny ve středu zad.
4. Obě poloviny břišních uzávěrů táhněte stejnoměrně dopředu a vedte přes sebe a suché zipy spojte pevně uprostřed na břicho.
5. Pás by neměl omezovat dýchání ani pohyb.

Sundání:

Uvolněte suché zipy a sundejte bederní pás z pasu. Zapněte suché zipy pro delší životnost bandáže.

Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme síťku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chlady.
- Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Skladování:

Bederní pás skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabráňte deformaci pásu tím, že jej nebudete skládat nebo přetěžovat.



SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída
240/75 612 00 Brno
Czechia



Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
PA, Elastan, dural

Ozhařovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.