

NÁVOD K POUŽITÍ

POJÍZDNÉ KLOZETOVÉ KŘESLO

512 E



CE

POUŽITÍ

Klozetové křeslo je součástí řady kompenzačních pomůcek pro osoby se sníženou schopností mobility a tělesně postižené. Svou konstrukcí usnadňuje pacientům toaletu a osobní hygienu, eliminují riziko pádu a zvyšují jeho soběstačnost. Využití nachází především tam, kde není možné, vzhledem k pacientově zdravotnímu stavu, použít standardně vybavené WC.

POPIS

Ocelový rám křesla je doplněn omyvatelnou plastovou toaletní deskou, polstrovaným sedákem, odnímatelnou opěrkou zad a plastovou toaletní nádobou (ACC/5A). Boční odnímatelná madla mají pohodlné polstrované područky. Křeslo je dále vybaveno odklopnými a odnímatelnými podnožkami a čtyřmi otočnými kolečky s nášlapnou brzdou.

BEZPEČNOSTNÍ UPOZORNĚNÍ

Před používáním křesla konzultujte jeho vhodnost s ošetřujícím lékařem.

Před používáním křesla si přečtěte návod a v případě nejasností kontaktujte dodavatele.

Při montáži křesla postupujte opatrně, aby nedošlo k zachycení a úrazu prstů.

Vždy kontrolujte, zda je křeslo suché a jsou-li odstraněny zbytky mycích prostředků.

Křeslo nepřetěžujte a nepřekračujte maximální statickou nosnost 125 kg (viz štítek).

Dodržujte doporučené maximální dynamické zatížení pomůcky 110 kg.

Je-li křeslo v klidu, vždy zaaretujte brzdy.

Při užívání křesla musí být všechny nohy v kontaktu s protiskluzovým podkladem.

Pro zachování maximální bezpečnosti pravidelně kontrolujte stav všech jistících prvků.

Při transportu (automobilem, autobusem, vlakem apod.) nepoužívejte křeslo k sezení.

Křeslo není určeno pro používání ve vlhkém prostředí (sprcha apod.).


Křeslo není určeno pro transport osob jako náhrada transportního vozíku.

OBSAH BALENÍ


Ujistěte se, zda jste obdrželi všechny části chodítka, tj. rám křesla s kolečky, opěrka zad s područkami, dvě odnímatelné podnožky se stupačkami, plastové hygienické prkénko, plastovou hygienickou nádobu, omyvatelný polstrovaný sedák a 2 aretační šrouby k připevnění opěrky zad.

SLOŽENÍ KŘESLA


Vyjměte z krabice rám křesla s kolečky. Zasuňte spodní část opěradla do otvorů v rámu (A) a dotáhněte šrouby (1). Nasadte područky na úchyty na přední části křesla (B) a zacvakněte pojistkou (2). Madla vyndáte uvolněním této pojistky. Nasadte podnožky na úchyty umístěné na bocích křesla (C) a otočte směrem dovnitř, dokud nezapadne bezpečnostní pojistka (3). Podnožky odklopíte uvolněním této pojistky. Pro nastavení výšky stupačky povolte a opět utáhněte šroub (4). Na rám umístěte plastové hygienické prkénko a na něj položte polstrované sedátko. Zezadu vložte do držáků plastovou toaletní nádobu. Nyní je křeslo připraveno k použití.

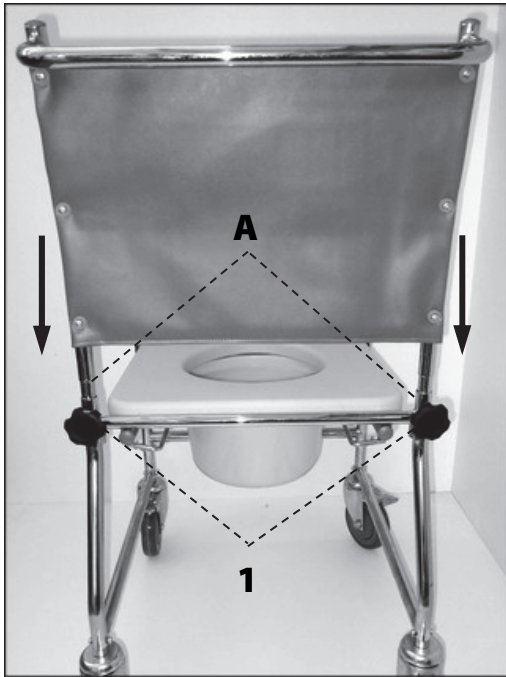


Nasazení opěrky zad

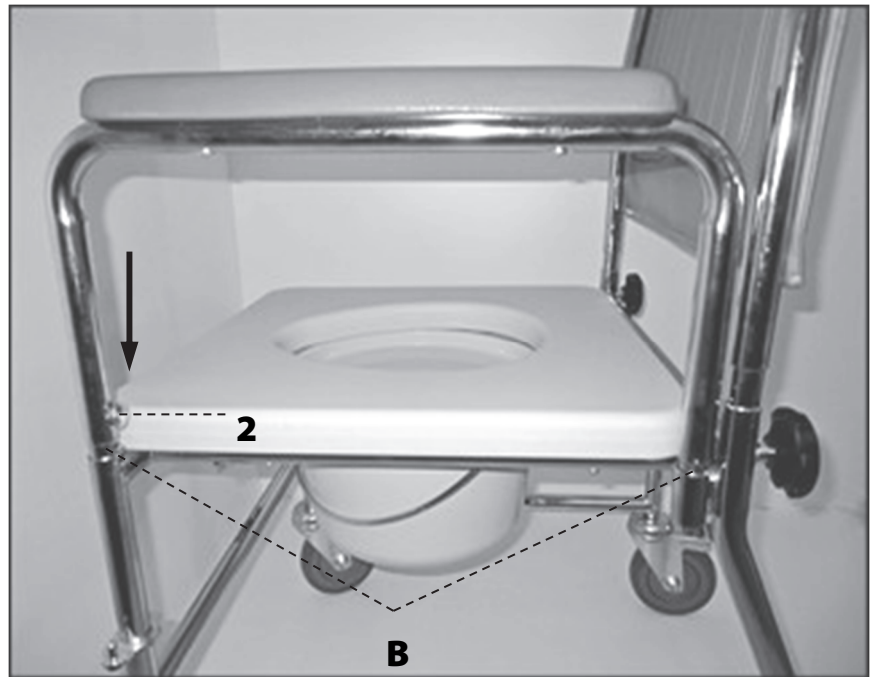


Nasazení područek

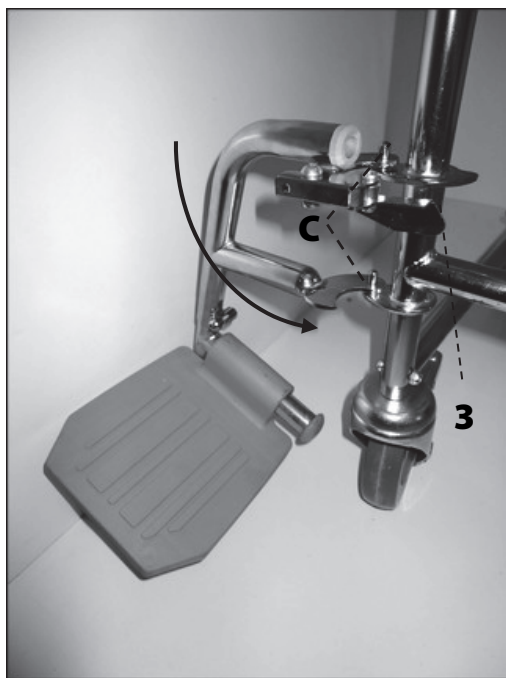

Nasazení podnožek

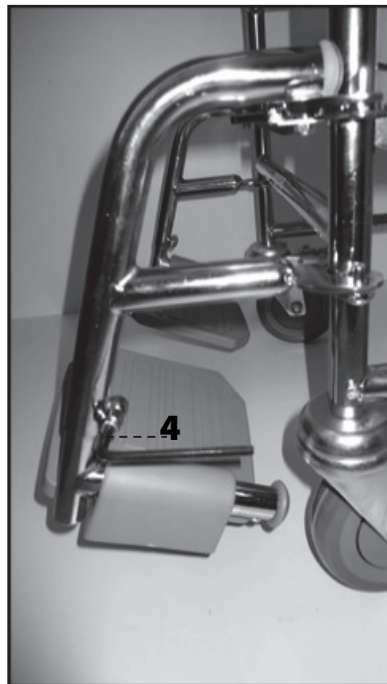

Nastavení výšky stupačky

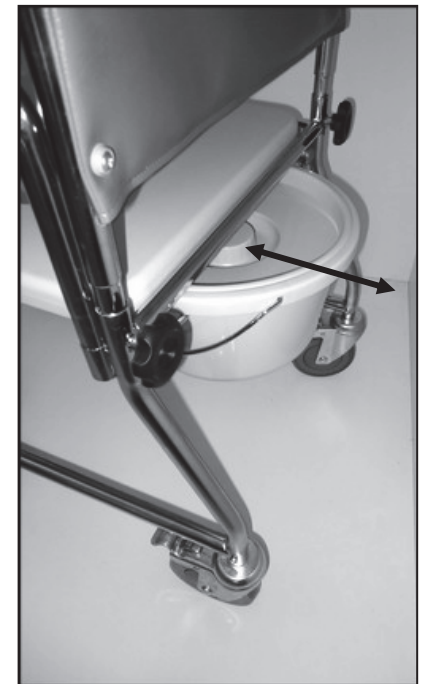

Manipulace s hygienickou nádobou

ÚDRŽBA

Křeslo lze čistit a udržovat běžnými čistícími, dezinfekčními a konzervačními prostředky, které neobsahují rozpouštědla. Pro zachování maximální funkčnosti a bezpečnost doporučujeme pravidelně kontrolovat stav všech jisticích prvků, koleček i brzd a odstraňovat mechanické nečistoty všech částí. Doporučujeme občasné promazání pohyblivých částí (olej WD 40).

SERVIS A OPRAVY

V případě nutnosti odstranění závady nebo provedení servisu, kontaktujte autorizovaného prodejce, který Vám poskytne veškeré informace