

Sanomed®

Sanomed 722 Peroneální páska

Peroneální páska udržuje kotník ve střední poloze a zvedá špičku při chůzi, čímž usnadňuje pohyb.



www.sanomed.cz



Návod k použití - 722

Děkujeme, že jste si vybrali naši pásku.

Tento návod vám ji pomůže správně používat.

Informace o účelu použití

Páska upravuje chůzi tak, že zvedá špičku při kroku, čímž zlepšuje stabilitu kroků.

Indikace: padavá noha při parézách (n. fibularis, n. ischiadicus)

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Pokud váš zdravotní stav souvisí se sníženým krevním oběhem v končetinách, poraďte se se svým lékařem, než ortézu použijete. Mezi takové zdravotní stavy patří mimo jiné diabetes nebo onemocnění periferních cév.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte pásku používat a poraďte se s lékařem.

Jak nasadit pásku

Vyberte správnou variantu:

Krátká – ideální pro nízké postavení, rychlé nasazení nad kotníkem

Dlouhá – pro vyšší oporu, zapíná se pod kolenem a dovoluje silnější přitážení

Umístěte pásku:

Vyberte variantu dle potřeby (krátká nebo dlouhá).

1. Umístěte pásku na končetinu a zapněte pomocí suchého zipu.
2. Suchý zip dotáhněte tak, aby neškrtil, ale byl dostatečně pevně uchycen.
3. Poté zahákněte háček na tkaničky obuvi.
4. U dlouhé varianty nastavte sílu tahu pro optimální zvednutí špičky.

Sundání:

- Rozepněte suchý zip a sejměte pásku.
- Zapněte suchý zipy pro delší životnost pásky.

Údržba a čištění:


- Používejte jemný prací prostředek.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Skladování

Pásku skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabráňte deformaci pásky tím, že jej nebudete skládat nebo přetěžovat.



	SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia
---	---

	Medical Device (Zdravotnický prostředek)
Materiálové složení: BA, PE	

Ohlašovací povinnost: Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.
--