

# Sanomed®

## Sanomed Stoma Břišní stomický pás

Efektivní podpora a zpevnění břišní stěny po operaci  
nebo při stomii.



[www.sanomed.cz](http://www.sanomed.cz)



# Návod k použití - pás Stoma

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž.

Tento návod vám pomůže pás správně používat.

## Informace o účelu použití

Pás je určen pro podporu a posílení břišních stěn a současně umožňuje skrytí stomického sáčku.

## Indikace:

stomie, kýly stěny břišní v kombinaci se stomií

## Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

## Před použitím bandáže si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poraďte se s lékařem.

## Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bandáž čistá a nepoškozená. Vhodnou velikost vyberte pomocí tabulky velikostí. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

## Nasazení:

1. Zkontrolujte, zda je pás suchý a čistý.
2. Ujistěte se, že máte správnou velikost a výšku podle své potřeby
3. Umístěte otvor pásu nad stomický sáček (průměr otvoru cca 8 cm, dá se pomocí suchých zipů mírně zvětšit/zmenšit dle potřeby).
4. Sáček jemně vtačte skrz otvor tak, aby byl fixován na místě.
5. Utáhněte pás pomocí suchých zipů - zajistíte tak pevné a stabilní přilnutí.
6. Pás by měl podírat břišní stěnu, ale neměl by omezovat dýchání ani pohyb.

## Odložení bandáže:


- Rozepteňte suché zipy a sejměte bandáž.
- Zapněte suché zipy pro delší životnost bandáže.

## Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme síťku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všíte etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

## Skladování

Bandáž skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci ortézy tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.

 <p>SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia</p>	<p><b>MD</b> Medical Device (Zdravotnický prostředek)</p> <p>Materiálové složení: BA, PE</p>	<p><b>Ohlašovací povinnost:</b> Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.</p>
---	--	--