

Vodotěsný návlek DryPro

Pro bezstarostné
koupání i po úrazu



Obvod končetiny měřte 7–10 cm nad koncem sádry, ne přes klouby.




Měřte na holé kůži. Ruka: od prostředníčku po sádro. Noha: od paty po okraj sádry. Přičtete 7–10 cm.



Přetáhněte návlek přes sádro. U horní končetiny může být potřeba pomoc druhé osoby.



Nasadte pumpičku a vysajte vzduch. Návlek přilne k pokožce a je připraven k použití.

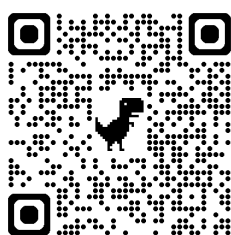

Nakupujte na www.sanomed.cz

Vodotěsný návlek Cryopush

Pro bezstarostné
mytí i po úrazu




Roztáhněte
silikonové těsnění.



Opatrně vsuňte
končetinu.



Upravte okraj
otvoru tak, aby byl
těsně uzavřen.

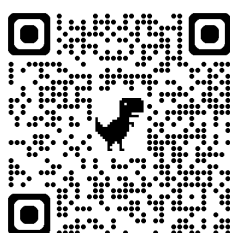

Nakupujte na www.sanomed.cz