

OMRON® E Long Life pads

Omyvatelné elektrody pro TENS-neurostimulátory OMRON

Pokyny pro použití:

Před prvním použitím pečlivě odstraňte z elektrod transparentní (průhlednou) ochranní fólii (viz. obr.1)

Elektrody aplikujte na část těla dle pokynů v manuálu Vašeho TENS- masážního přístroje.

Po ukončení masáže, vraťte elektrody do ochranného bílého pouzdra (viz. obr.4),

Mytí elektrod:

K umytí elektrod přistupte vždy po třiceti masážích nebo tehdy, když zjistíte malou přilnavost elektrod k Vašemu tělu při masáži (elektrody nedrží na těle).

- Elektrody ponořte pod tekoucí, studenou vodu na několik vteřin.
- Pro mytí elektrod použijte pouze bříška Vašich prstů (viz. obr.2)
- Po umytí elektrodami mírně zaklepejte, aby opadla voda ulpěná na jejich povrchu (viz. obr.3), nechte je oschnout na vzduchu (Neutírat přilnavou vrstvu do textilu nebo oblečení !) a uložte elektrody do ochranného pouzdra (viz. obr.4)

Co nesmíte !

- Na čištění nepoužívejte horkou vodu, saponát ani žádné jiné chemické prostředky (rozpouštědlo, benzín,...) !
- Na přilnavou (lepící) vrstvu elektrod nepoužívejte žádné hrubé mechanické prostředky (Vaše nehty, kartáče,...) Na mytí použijte jen bříška Vašich prstů!

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:

- Před masáží si omyjte či očistěte části Vašeho těla, kde budete přikládat elektrody k masáži, prodloužíte tak výrazně životnost Vašich elektrod.
- Pokud jste před masáží cvičili nebo se koupali, počkejte chvíli (kvůli pocení) a utřete se , aby byla Vaše kůže suchá .
- Neomývejte elektrody příliš dlouho a často !
- Nenechávejte elektrody na místech s vysokou vlhkostí, vysokou teplotou a na přímém slunci.
- Jestliže elektrody správně užíváte a přesto se ztratí přilnavost, nechte je přes noc v lednici, přilnavost se tím může zlepšit.

Záruční lhůta je 24 měsíců*

*záruka se nevztahuje se na:

- škody vzniklé opotřebením, neodborným a nešetrným zacházením
- škody vzniklé provozováním v rozporu s návodem k použití.



fig.1

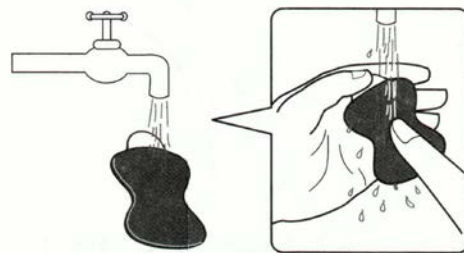


fig.2

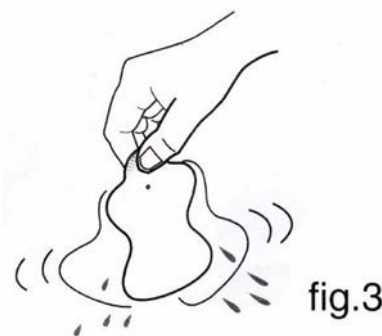


fig.3

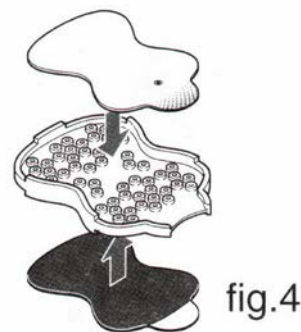


fig.4

 Výrobce	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPONSKO
EC REP Zástupce pro EU	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpis 33, 2132 LR Hoofddorp, NIZOZEMSKO www.omron-healthcare.com
Výrobní závod	OMRON HEALTHCARE MANUFACTURING VIETNAM CO., LTD. No.28 VSIP II, Street 2, Vietnam-Singapore Industrial Park II, Binh Duong Industry-Services-Urban Complex, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong Province, Vietnam
Pobočky	OMRON HEALTHCARE UK LTD. Opal Drive, Fox Milne, Milton Keynes, MK15 0DG, UK www.omron-healthcare.com
	OMRON MEDIZINTECHNIK HANDELSGESELLSCHAFT mbH Gottlieb-Daimler-Strasse 10, 68165 Mannheim, NĚMECKO www.omron-healthcare.com
	OMRON SANTÉ FRANCE SAS 14, rue de Lisbonne, 93561 Rosny-sous-Bois Cedex, FRANCIE www.omron-healthcare.com
Distribuce, servis pro ČR a metrologické ověření pro lékařská zařízení 	CELIMED s.r.o. Sociální péče 3487/5a, 40011 Ústí nad Labem pozáruční servis - tel.: 475 208 180, e-mail: info@celimed.cz www.celimed.cz