


# Sanomed®

## SANOMED 457 Klavikulární bandáž

Univerzální ortéza pro zpevnění  
klíční kosti a korekci držení těla

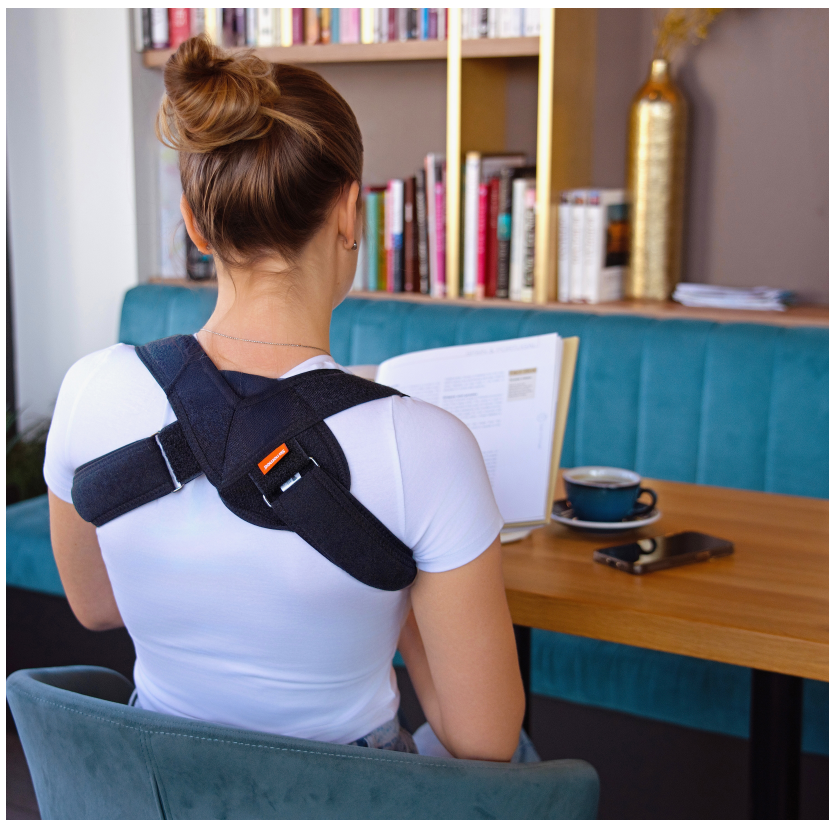

[www.sanomed.cz](http://www.sanomed.cz)



# Návod k použití - SANOMED 457

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž. Tento návod vám ji pomůže správně používat.

## Informace o účelu použití:

Tato bandáž je určena k fixaci klíční kosti, obvykle při jejím zlomení nebo při posturálních problémech (např. špatné držení těla).

**Indikace:** Nestabilita klíční kosti, po operacích v oblasti klíční kosti, posturální problémy.

**Kontraindikace:** V současné době nejsou známy.

## Před použitím bandáže si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poraďte se s lékařem.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bandáž čistá a nepoškozená

## Nasazení:

1. Uvolněte suché zipy a položte zádivou část doprostřed lopatek.
2. Zádové tahy bandáže vedte kolem ramen a ujistěte se, že procházejí podpažními.
3. Provlékněte je na zádech přezkami, utáhněte a zapněte suché zipy.
4. Ramena by měla být mírně stažena dozadu.

## Odložení bandáže:


- Rozepněte přezku a sejměte bandáž.
- Zapněte suché zipy pro delší životnost bandáže.

## Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme síťku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

## Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci bandáže tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.

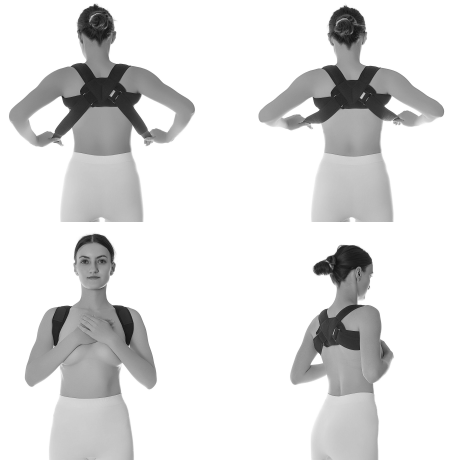

SANOMED, spol. s r.o.  
Palackého třída  
240/75 612 00 Brno  
Czechia



Medical Device  
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:  
PA, PES, PU pěna

### Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.