



SANOMED 208

Ramenní zívěs

Závěs je určen k fixaci ramenního kloubu, odlehčení paže při zlomenině nebo poranění, podpora při rehabilitaci po operaci.



Návod k použití - SANOMED 208

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž - závěs na rameno. Tento návod vám jej pomůže správně používat.

Informace o účelu použití:

Tento závěs je určen k fixaci ramenního kloubu, odlehčení paže při zlomenině nebo poranění, podpora při rehabilitaci po operaci.

Indikace: pooperační a poúrazové stavy ruky, předloktí nebo lokte, prevence vzniku bolestivého ramene.

Kontraindikace: V současné době nejsou známy.

Před použitím bandáže si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poraďte se s lékařem.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bandáž čistá a nepoškozená

Nasazení:

1. Paži vložte do závěsného vaku, aby byla podpořena celá délka předloktí.
2. Popruh umístěte přes protilehlé rameno (např. při zranění pravé ruky popruh vede přes levé rameno).
3. Nastavte popruh tak, aby paže byla v pohodlné poloze přibližně v úhlu 90°.
4. Ujistěte se, že závěs nepůsobí tlak na krk ani podpaží.
5. Oblékání / sundávání závěsu zjednodušuje přezka, pomocí které popruh přes rameno jednoduše odepněte nebo připněte a nemusíte zapínat nebo rozepínat suché zipy.

Odložení bandáže:

- Rozepněte přezku a sejměte závěs.
- Zapněte suché zipy pro delší životnost bandáže.

Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme sítku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci bandáže tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.



SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída
240/75 612 00 Brno
Czechia



Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
PA, PES, PU pěna

Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.