

# Sanomed®

## **SANOMED 705** **Hlezenní bandáž**

Univerzální křížová hlezenní bandáž je ideální pomůckou pro podporu a stabilizaci kotníku během sportovních aktivit, rehabilitace či běžného nošení.



# Návod k použití - SANOMED 705

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž. Tento návod vám ji pomůže správně používat.

## Informace o účelu použití:

Univerzální křížová hlezenní bandáž je ideální pomůckou pro podporu a stabilizaci kotníku během sportovních aktivit, rehabilitace či běžného nošení.

## Indikace:

Prevence zranění kotníku: Při sportovních aktivitách, jako je běh, fotbal, basketbal nebo tenis.

Rehabilitaci po zranění nebo operaci: Podpora kotníku při zotavování z výronu, natažení vazů nebo jiných poranění.

Chronických potíží: Pomáhá při nestabilitě kotníku, artritidě nebo bolestivosti kloubu.

**Kontraindikace:** V současné době nejsou známy.

## Před použitím bandáže si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poradte se s lékařem.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bandáž čistá a nepoškozená.
- Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bandáž čistá a nepoškozená.

## Nasazení:

1. Vložte chodidlo pod pásku ve střední části bandáže.
2. Překřížte konce bandáže přes nárt.
3. Zapněte suché zipy pevně, ale pohodlně, aby neomezovaly krevní oběh.
4. Pohybuje kotníkem a ujistěte se, že bandáž neklouže ani nezpůsobuje nepohodlí.

## Odložení bandáže:


- Rozepněte suchý zip a sejměte bandáž.
- Zapněte suchý zip pro delší životnost bandáže.


## Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme sítku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

## Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci bandáže tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.

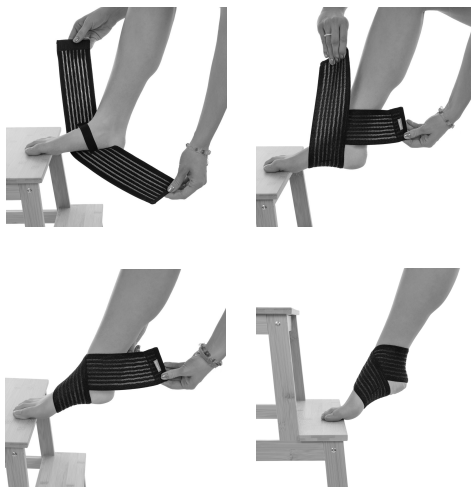

 <p>SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia</p>	<p><b>MD</b> Medical Device (Zdravotnický prostředek)</p> <p>Materiálové složení: PA, PES</p>	<p><b>Ohlašovací povinnost:</b> Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.</p>
---	---	--