



Sedací kruh

Speciální sedák z paměťové pěny pro pohodlné a bezbolestné sezení, ideální při hemoroidech, bolestech kostrče nebo po operacích v oblasti pánve.



Návod k použití – sedací kruh

Děkujeme, že jste si vybrali sedací kruh. Tento návod vám jej pomůže správně používat.

Informace o účelu použití:

- Anatomický tvar s otvorem – zmírňuje tlak v citlivých partiích a přináší úlevu při dlouhodobém sezení.
- Paměťová pěna (visco) – dokonale se přizpůsobí tvaru těla, rozkládá zátěž a podporuje regeneraci.
- Univerzální použití – vhodný do domácnosti, kanceláře, auta i zdravotnických zařízení.

Technické parametry:

Rozměry: průměr 43 cm, výška 9cm

Materiál výplně: 100% paměťová pěna (viscoelastická)

Potah: textilní potah, sundavatelný, 80% bavlna, 20% polyester

Barva potahu: šedá

Maximální nosnost: 110 kg

Hmotnost: 550 g

Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci tím, že jej nebudete skládat nebo přetěžovat.

Údržba a čištění:

Textilní potah:

- Rozepněte zip a sundejte textilní potah
- Perte ručně ve vlažné vodě (max. 30°C) s jemným pracím prostředkem
- Neždímejte, nesušte v sušičce ani na přímém slunci.
- Nežehlete

Výplň z viscoelastické pěny::

- otřete vlhkým hadříkem
- neperte
- nesušte



SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída
240/75 612 00 Brno
Czechia