

Sanomed®

Sanomed 453 Hrudní pás

Pás je určen k pevnému stažení hrudníku při různých typech poranění hrudníku.



Návod k použití hrudního pásu 453

Děkujeme, že jste si vybrali náš hrudní pás. Tento návod vám pomůže správně používat a udržovat hrudní pás pro dosažení co nejlepších výsledků.

Informace o účelu použití:

Hrudní pás je určen k pevnému stažení hrudníku při různých typech poranění hrudníku.

Indikace:

všechny situace, u nichž je nutné zpevnění horní části trupu a páteře, jako např. naražená žebra, natržené či namožené svalstvo v hrudní oblasti, jednoduché zlomeniny žebér ve spodní části hrudníku.

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím hrudního pásu si přečtete všechny bezpečnostní pokyny:

- Používejte hrudní pás pouze podle pokynů vašeho lékaře nebo fyzioterapeuta.
- Nepoužívejte hrudní pás na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte pás používat a poradte se s lékařem.

Pokyny k nasazení / sundání

Před nasazením hrudního pásu si zkontrolujte, že je čistý a nepoškozený.

Nasazení:

1. Hrudní pás obtočte v hrudní oblasti kolem těla.
2. Levou polovinu pásu přitlačte na hrudníku k tělu, pravou polovinu napněte a přiložte na levou polovinu, čímž zapnete pás v požadované kompresi.
3. Pás při nasazování a sundávání nikdy netahejte za okraje. Může dojít k deformaci nebo vytažení materiálu. Vždy jej upravujte uchopením za pevnější části nebo přímo za zapínání.

Odložení:

Chcete-li hrudní pás odložit, rozepněte obě poloviny a sejměte jej. Pásk zapněte, čímž prodlouží jeho životnost.


Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme sítku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla nebo chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na etiketě všité na horním okraji produktu.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Doba použití / životnost výrobku

Životnost zdravotnického prostředku je určena přirozeným opotřebením při řádné a vhodné manipulaci.



 <p>SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia</p>	<p>MD Medical Device (Zdravotnický prostředek)</p> <p>Materiálové složení: BA, PE</p>	<p>Ohlašovací povinnost: Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.</p>
---	--	--