



SANOMED 309

Prstová ortéza

Lehká prstová ortéza s fixací



Návod k použití – SANOMED 309

Děkujeme, že jste si vybrali naši prstovou ortézu. Tento návod vám ji pomůže správně používat.

Informace o účelu použití:

Prstová ortéza je určena k dočasné fixaci článku prstu v extenzi (např. po poranění extenzorových úponů, při zlomeninách distálního článku, distorzích IP kloubu, kontuzích okolo nehtu nebo pooperačních stavech).

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím ortézy si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte ortézu na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte ortézu používat a poraďte se s lékařem.

Pokyny k nasazení ortézy:

1. Před použitím si důkladně umyjte a osušte ruku.
2. Uvolněte suchý zip a otevřete pásku.
3. Umístěte dlahu na postižený prst tak, aby nehet byl v otvoru dlahy.
4. Přiložte pásku přes dlahu a pevně (nikoliv však bolestivě) ji připevněte pomocí suchého zipu.
5. Zkontrolujte, že prst je v požadované poloze (lehce natažený), že nedochází k přílišnému tlaku na kůži nebo nehet.
6. Pokud je ortéza používána po zlomenině nebo chirurgickém zákroku, postupujte přesně podle pokynů ošetřujícího lékaře.

Kontrola:

- Zkontrolujte, že prst je stabilizovaný a pohyb je omezen jen v potřebném rozsahu.
- Vyzkoušejte lehké pohyby ostatních prstů - neměly by být omezené.

Upozornění:

- Používejte pouze podle pokynů lékaře.
- Nepřetahujte suchý zip – přílišné utažení může způsobit otlačky nebo poruchu prokrvení.
- Pravidelně kontrolujte stav pokožky pod ortézou. V případě zarudnutí nebo bolesti ortézu ihned sundejte a poraďte se s lékařem.
- Nepoužívejte poškozenou nebo deformovanou ortézu.

Údržba a čištění:

- Ortézu otřete vlhkým hadříkem s jemným mýdlem nebo dezinfekčním prostředkem.
- Nepoužívejte bělidla, aviváže ani chemické čističe.
- Neždímejte, nesaňte v sušičce, nežehliť.
- Sušte volně na vzduchu, mimo přímé sluneční záření nebo zdroj tepla.

Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla.



 SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia	MD Medical Device (Zdravotnický prostředek) Materiálové složení: Polypropylen, suchý zip	Ohlašovací povinnost: Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.
---	---	--