

Návod k použití

NEURODYN® COMFORT – ortéza pro zvedání přednoží

Účel použití

NEURODYN® COMFORT je ortéza pro zvedání chodidla se semi-elastickou osmičkovou bandáží, určená k dynamické kompenzaci nekompletních a spastických paréz.

Indikace

ochablá i spastická paréza zvedání chodidla (např. po cévní mozkové příhodě, roztroušené skleróze, peroneální paréze, u jiných neurologických nebo svalových onemocnění)

Kontraindikace

- alergické, zánětlivé nebo úrazové změny kůže (např. otok, zarudnutí) v oblasti použití
 - poruchy krevního oběhu nebo lymfatické otoky měkkých tkání
 - neurogenní poruchy cití a trofiky kůže v oblasti použití (poruchy citlivosti s poškozením kůže nebo bez něj)
-

Vedlejší účinky

Při správném použití a korektní aplikaci nejsou doposud známy žádné nežádoucí účinky, pozdní intolerance ani alergické reakce.

Cílová skupina pacientů

Ortéza je určena pro všechny pacienty s ohledem na indikace a kontraindikace. Zaškolení a výběr správné velikosti provádí zdravotnický odborník.

Nasazení a používání

- Doporučujeme nosit pod ortézou ponožku.
- Vložte ortézu do obuvi tak, aby zvedací pásy směřovaly vpravo a vlevo ven. (1)
- Plochou část kolem kotníku umístěte doprostřed nad Achillovu šlachu, přičemž Y-tvarovaný pásek směřuje ven. (2)

- **Trik se zacvaknutím:** jemně stiskněte kotníkovou část směrem dovnitř, dokud nezacvakne. (3)

Důležité: kotníkový prvek stlačujte pouze směrem dovnitř. Ohnutí směrem ven může poškodit všitou kovovou výztuhu.

- Uzavřete kotníkovou část vnitřním páskem se suchým zipem. (4)
- Přes vnější Y-tvarovaný pásek s průvlekovým očkem můžete kotníkovou část dále upravit. (5)
- Obujte si botu, postavte chodidlo na zem a pokrčte koleno dopředu. (6)
- Zvedací pásky zapněte **křížem** a pod mírným napětím k tělu kotníkové části. Provedte několik kroků a otestujte zdvih přednoží. V případě potřeby pásky upravte. (7)

Pokyny pro ortopedického technika

Podešev NEURODYN® COMFORT lze individuálně přizpůsobit konkrétní obuvi.

Důležitá upozornění

- O indikaci a době nošení ortézy je vždy nutné se poradit s ošetřujícím lékařem.
- Zkontrolujte funkci ortézy společně s lékařem nebo odborným prodejcem.
- Výrobek je určen pro jednoho pacienta.
- Nenoste ortézu na otevřených ranách.
- Aby byla zachována životnost a funkčnost ortézy, nenoste ji s mastnými či kyselými krémy, mastmi nebo mléky.
- Výrobek může přijít do kontaktu se stříkající vodou.
- Suché zipy vždy řádně uzavřete. Nesprávné zapínání není důvodem k reklamaci.
- Při vážných nežádoucích událostech kontaktujte lékaře, dodavatele zdravotnických potřeb nebo výrobce SPORLASTIC na info@sporlastic.de.
- Neodborné úpravy nebo nesprávné použití vylučují odpovědnost výrobce.
- Možné rizikové interakce s jinými léčebnými postupy konzultujte s lékařem.
- Obal i produkt odevzdejte do místního systému tříděného odpadu.
- SPORLASTIC GmbH je zapojena do systému zpětného odběru obalů dle platné legislativy.

Údržba

- Kotníkovou část a pásky perte jemně v **30 °C** v rukách pomocí tekutého pracího prostředku.
- Neždímejte v sušičce, nesušte na topení ani v mikrovlnné troubě.
- Vložku lze čistit vlhkým hadříkem.
- Nežehlete, chemicky nečistěte.

Podmínky přepravy a skladování

- Skladujte na suchém místě, chraňte před vlhkostí a slunečním zářením.
 - Uchovávejte při běžné pokojové teplotě a normální vlhkosti.
-

System řízení kvality

Všechny produkty SPORLASTIC GmbH podléhají kontrole v rámci jejich systému řízení kvality. V případě reklamace kontaktujte svého odborného prodejce.