

Sanomed®

Sanomed - 405 Bederní pás s přídatným tahem

Efektivní ochrana, tepelná izolace a podpora bederní oblasti.



www.sanomed.cz



Návod k použití - pás 405

Děkujeme, že jste si vybrali náš bederní pás.

Tento návod vám pomůže pás správně používat.

Informace o účelu použití

Pás je určen k tepelné izolaci a podpoře bederní i ledvinové oblasti. Pomáhá chránit bedra před chladem, podporuje termoregulaci a přispívá k pohodlí při pohybu.

Indikace: tepelná pomůcka při zánětech v oblasti ledvin, akutní lumbago, funkční poruchy bederní páteře.

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím pásu si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte pás na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte pás používat a poraďte se s lékařem.

Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je pás čistý a nepoškozený. Pás používejte na tenké prádlo nebo přímo na tělo. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

Nasazení:

- Zkontrolujte, zda je pás suchý a čistý.
- Obtočte pás kolem pasu tak, aby zadní část s přídatným tahem přiléhala k páteři.
- Levou a pravou stranu pásu rovnoměrně táhněte dopředu a na břicho je spolu pomocí suchého zipu zapněte.
- Poté nastavte zdvojený tah na požadovanou úroveň komprese a zapněte.
- Bandáž by měla zateplit pokrytou oblast, ale neměla by omezovat dýchání ani krevní oběh.
- V případě zhoršení příznaků nebo podráždění přestaňte používat a konzultujte s vaším lékařem nebo odborným prodejce.

Odložení pásu:

- Rozepněte suché zipy a sejměte pás.
- Zapněte suché zipy pro delší životnost pásu.

Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme sítku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Skladování

Pás skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci pásu tím, že jej nebudete skládat nebo přetěžovat.



SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída
240/75 612 00 Brno
Czechia



Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
Nylon, PU

Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobcí a příslušnému úřadu členského státu.