

Bio-Gel tubulární chránič prstů na nohou

Popis

Tubulární ochrana z elastické tkaniny s vnitřním povlakem z Tecniwork® Polymer Gelu, která chrání prsty na nohou před tlakem a odřením. Předchází bolesti a přináší úlevu v případě otlaků, tvrdých i měkkých kuřích ok, nápadně nevyčnívá v botě (lze zastříhnout na míru). Omyvatelný a opakovaně použitelný zdravotnický prostředek.

Použití a údržba

Perte vodou a mýdlem. Osušte. Posypte zevnitř mastkem (talkem) a nasadte na nohu.

Upozornění

Nepoužívejte na poškozenou kůži. V případě zarudnutí nebo podráždění přerušte používání, postiženou oblast omyjte velkým množstvím vody a poraďte se s lékařem. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevyhazujte do přírody. Likvidujte s netříděným odpadem.

Ostatní údaje

Zdravotnický prostředek třídy I. Při výskytu závažného incidentu jej nahlase na: Tecniwork S.p.A. (info@tecniwork.it) nebo Ministero della Salute (www.salute.gov.it).

Výrobce: TECNIWORK S.p.A., Via R. Benini 8, 50013 Campi Bisenzio, Firenze, Itálie.
Vyrobeno mimo EU.

Tříděný sběr: ověřte pokyny vaší obce — krabička PAP 22, blistr PLAST PET 01.

Dispositivo Medico di Classe I



In caso di incidente grave fare segnalazione a:

- Tecniwork S.p.A. info@tecniwork.it
- Ministero della Salute www.salute.gov.it



TECNIWORK S.p.A.

Via R. Benini, 8
50013 Campi Bisenzio
FIRENZE - ITALIA

Made in extra U.E.

RACCOLTA DIFFERENZIATA

Verificare le disposizioni del Comune
Astuccio CARTA PAP 22
Blister PLASTICA PET 01



CB110B

Paraf. 902338829



8

023568

140102