

Eye Cool Pack – Návod k použití (čeština)

Tynor Eye Cool Pack je opakovaně zmrazitelný chladivý polštářek určený k úlevě od napětí, únavy a otoků kolem očí. Jde o efektivní a cenově dostupnou volbu pro snížení suchosti očí, bolesti hlavy a zánětu způsobeného alergenem. Jeho jedinečný tvar aviator pomáhá správně pokrýt oblast kolem očí.

Konstrukce

Gelový polštářek je vyroben z měkké a pružné fólie, naplněné hydrofilním gelem, který pomáhá udržet chladnou teplotu po delší dobu. Měkký textilní vnější potah s elastickým páskem umožňuje snadnější použití a nastavení.

Použití

dlouhé hodiny u obrazovky, oteklé oči, namožené oči, suché oči, kruhy pod očima, bolesti hlavy, oční alergie, pooperační rekonvalescence – oči.

Vlastnosti

- gelem plněný polštářek udrží potřebnou teplotu po dlouhou dobu, jemný a plyšový, vhodný pro citlivou pokožku,
- nastavitelný pásek umožňuje bezpečné nasazení,
- tvar aviator poskytuje širší pokrytí kolem očí,
- opakovaná zmrazitelnost dělá produkt ekonomickým,
- lehký a přenosný.

Upozornění

- Použití chladivého polštářku na oči by se měli vyvarovat pacienti s určitými zdravotními stavy, jako je revmatoidní artritida, Raynaudův syndrom, chladová alergie, ochrnutí nebo oblasti se sníženou citlivostí.
- Osoby s poruchou vnímání chladu by měly s tímto produktem postupovat s maximální opatrností.
- Při použití po chirurgických zákrocích se řiďte pokyny lékaře.
- Pokud obsah přijde do styku s pokožkou nebo očima, okamžitě opláchněte vodou.
- Pokud podráždění nebo zarudnutí přetrvává, poraďte se s lékařem.
- Nepoužívejte, pokud je gelový polštářek propíchnutý nebo poškozený.
- Nesedějte ani nelehejte na gelový polštářek – nadměrná váha může způsobit prasknutí nebo únik náplně.

Hlavní přednosti

- opakovaně zmrazitelný,
- nastavitelné nasazení,
- měkký a pohodlný,
- tvar aviator.

Materiálové složení

Polyamid, elastan, polyester, polyuretan, polypropylen, glycerin, methylparaben, propylparaben, trietanolamin a propylenglykol.

Pokyny k použití

- Chladivý polštářek vždy používejte s jeho textilním potahem.
- Omezte jednu aplikaci na dvacet minut.
- Přerušete používání a vyhledejte odborného lékaře v případě:
 - poruchy citlivosti,
 - poruchy krevního oběhu,
 - alergické vyrážky nebo svědění,
 - pokud bolest zesiluje nebo přetrvává.
- Nesprávné nebo nevhodné používání zařízení může vést k nežádoucím účinkům a snížené účinnosti.
- Pečlivě dodržujte pokyny uvedené na krabici.
- Zlikvidujte odpovídajícím způsobem podle nemocničních pokynů / předpisů dané země.

Výrobce: Tynor Orthotics Pvt. Ltd. Plot No. 169–170, Sector 82, JLPL Industrial Area Mohali, Punjab – 140308, Indie

Distributor: SANOMED, spol. s r.o., Palackého třída 240/75, 612 00 Brno, CZ