

Sanomed®

LumbosacralSan Bederní pás

Bederní pás s výztuhami a
přídavnými popruhy



www.sanomed.cz



Návod k použití - bederní pás LumbosacralSan

Děkujeme, že jste si vybrali náš bederní pás. Tento návod vám pomůže správně používat a udržovat váš bederní pás pro dosažení nejlepších výsledků.

Informace o účelu použití:

LumbosacralSan je ortéza ke stabilizaci bederní páteře.

Indikace:

všechny indikace, u nichž je nutná stabilizace bederní páteře, akutní a chronické bolesti zad, diskopatie, spondylolýza, degenerativní onemocnění páteře, lumbalgie při myostatické a svalové nedostatečnosti, symfyzeolýza, funkční bolesti páteře, lehké póuzarové stavy, diskopatie, bolesti při osteoporóze.

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím bederního pásu si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte bederní pás na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bederní pás používat a poradte se s lékařem.

Pokyny k nasazení / sundání

Před nasazením bederního pásu si zkontrolujte, že je čistý a nepoškozený.

Nasazení:

1. Než nasadíte ortézu, uvolněte popruhy. Prsty vložte do poutka na ruku na levé straně břišního dílu a bandáž vedte kolem pasu.
2. Obě poloviny břišních uzávěrů táhněte stejnoměrně dopředu a vedte přes sebe a suché zipy spojte pevně uprostřed.
3. Při zapínání nejprve vytáhněte prsty z levého poutka.
4. Zapněte utahovací popruhy. Napětí popruhů můžete regulovat podle svých požadavků a tím regulovat podporu bederní páteře.

Sundání:

Uvolněte suché zipy a sundejte bederní pás z pasu. Zapněte suché zipy pro delší životnost bandáže.

Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme síťku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chlady.
- Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla
- Nežehlete a nesušte v sušičce

Skladování:

Bederní pás skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci pásu tím, že jej nebudete skládat nebo přetěžovat.



SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída
240/75 612 00 Brno
Czechia



Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
PA, Elastan, dural

Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.