

Sanomed®

GenuSan Active **Elastická kolenní bandáž**

Elastická bandáž kolene navržena pro sportovní aktivity.



www.sanomed.cz



Návod k použití - GenuSan Active

Děkujeme, že jste si vybrali naši kolenní bandáž.
Tento návod vám ji pomůže správně používat.

Informace o účelu použití

Kolenní pleteninová návleková bandáž GenuSan Active je vyrobena technologií kruhového pletení a je navržena pro maximální pohodlí a podporu během nošení. Díky využití moderních syntetických vláken je tato bandáž vysoce prodyšná, odvádí vlhkost a teplo, čímž efektivně snižuje pocení.

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím bandáže si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poraďte se s lékařem.

Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bandáž čistá a nepoškozená. Bandáž použijte přímo na tělo.

Jak bandáž nasadit – krok za krokem

1. Posadte se a uvolněte nohu; ideálně mírně pokrčte koleno (cca 10–20°).
2. Protáhněte bandáž přes chodidlo a natáhněte ji směrem nahoru přes lýtko ke kolenu. Dbejte, aby se pletenina rovnoměrně rozložila.
3. Ujistěte se, že šev na horním okraj bandáže s protiskluzovými nopky je na zadní straně stehna, a zákolení bylo v oblasti vysoce elastické části pleteniny.
4. Bandáž upravte tak, aby komprese byla rovnoměrná; nesmí způsobovat bolest, brnění nebo výrazné omezení oběhu.
5. K sejmutí bandáže ji uchopte za horní okraj, prohněte jej a bandáž stáhněte dolů.

Doporučení pro nošení

Bandáž je navržena k nošení po celý den během aktivity; při delších klidových obdobích (dlouhé sezení, jízda autem, spánek) se doporučuje bandáž odložit. Pokud se zhorší bolest nebo se objeví otoky, sundejte bandáž a poraďte se s lékařem.

Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme sítku na praní.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci bandáže tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.



SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída
240/75 612 00 Brno
Czechia



Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
Polyamid, Elastan, silikon

Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.