

Bauerfeind Sports Knee Strap

Určený účel použití

Bauerfeind Sports Knee Strap je zdravotnický prostředek. Podpora patelárního šlachového aparátu je speciálně navržena pro sportovní aktivity; právě tehdy vyvíjí svůj účinek. Podpora obsahuje masážní podložku s čtyřmi tlakovými body, které navádějí a uvolňují postiženou šlachu na koleni. Zatímco centrální tlakové body navádějí a podporují šlachy, boční tlakové body zlepšují svalovou koordinaci kolenního kloubu. Tlak vyvíjený podporou lze nastavit pomocí volně nastavitelného suchého zipu.

Indikace

- Chondropatie patelly
- Tendinitida patelárního vazy (skokanské koleno, syndrom špičky patelly, proximální tendinopatie patelárního vazy)
- Bolest v přední části kolene

Kontraindikace

Do dnešního dne nebyly hlášeny žádné klinicky významné precitlivělostní reakce. Pokud trpíte některým z následujících stavů, sportovní podpora by měla být nasazena a nošena pouze po konzultaci s vaším lékařem:

- Poruchy kůže / poranění v příslušné části těla, zejména pokud je přítomno zánětlivé onemocnění. Stejně tak jakékoliv vystouplé jizvy se zduřením, zarudnutím a nadměrným zahříváním.
- Žilní nedostatečnost (varikóza)
- Poruchy pocitu a oběhové poruchy dolních končetin, např. diabetes mellitus
- Porucha lymfatického odtoku – včetně otoků měkkých tkání nejasného původu umístěných vzdáleně od nasazené podpory

Rizika spojená s použitím tohoto výrobku

- Tento výrobek je určen pouze pro léčbu jedné osoby.
- Unikátní účinek Sports Knee Strap se projevuje především během fyzické aktivity; proto byste tento výrobek měli nosit pouze pro tuto oblast použití. V případě mírné zátěže a během dlouhých odpočinkových přestávek by měl být výrobek sundán.
- Nepřízpůsobujte výrobek žádným způsobem. Nedodržení tohoto požadavku může negativně ovlivnit výkon výrobku a tím zrušit jakoukoli odpovědnost za výrobek.
- Do dnešního dne nebyly hlášeny žádné vedlejší účinky ovlivňující celé tělo. Předpokládá se správné použití / nasazení. Jakékoli podpory aplikované externě na tělo mohou při nadměrném stažení vést k místním tlakovým příznakům nebo zřídka stlačit podkladové cévy nebo nervy.
- Pokud si všimnete jakýchkoli neobvyklých změn (např. zvýšených příznaků), obraťte se okamžitě na svého lékaře.
- Vyhněte se styku s mastmi, masážními lotiony nebo jakýmkoli látkami obsahujícími tuky a kyseliny.
- Nikdy nevystavujte Sports Knee Strap přímému teplu (např. topení, sluneční světlo, ve vašem autě atd.)! To může způsobit poškození materiálu, což může snížit účinnost výrobku.

Nasazení bandáže

1. Před nasazením povolte oba suché zipy. Jednu stranu úplně otevřete tím, že koncovku vytáhnete ze spony. Sports Knee Strap nasuňte na střed česky s polokruhovým výřezem nahoře.
2. Pak protáhněte suchý zip zpět.
3. Nyní táhněte obě koncovky pásu najednou stejnou silou, abyste zabránili tomu, aby se podpora přetočila. Ujistěte se, že podpora sedí správně a je ve stejné úrovni s patelární šlachou. Můžete nastavit tlak na patelární šlachy podle svých potřeb, ale nesmí to být nepříjemné.
4. Nyní připevněte obě konce suchého zipu na pásku. V závislosti na vašich potřebách a úrovni aktivity můžete znovu upravit jednotlivý tlak na patelární šlachy.

Bauerfeind Sports Knee Strap

Sejmutí bandáže

Při odkládání bandáže nejprve uvolněte oba spoje se suchým zipem a pak jednu stranu zcela vytáhněte ze spony. Při uskladnění by měly být oba konce pásů opět přichyceny, abyste předešli poškození.

Pokyny k čištění

Používejte prosím jemný prací prášek a prací pytlík. Nikdy nevystavujte výrobek přímému teplu / chladu. Dodržujte také pokyny na vsazené etiketě na horním okraji vašeho výrobku. Pravidelná péče zaručuje optimální účinnost výrobku.

Záruka

Platí právní předpisy země nákupu. Pokud je to relevantní, platí mezi kupujícím a prodejcem země specifická záruční ustanovení. V případě možného uplatnění nároku na záruku se obraťte přímo na prodejce, od kterého jste výrobek zakoupili.

Prosím, neprovádějte žádné úpravy výrobku sami. Dodržujte naše pokyny k použití a údržbě. Tyto pokyny jsou založeny na letech zkušeností a zajišťují, že naše lékařsky účinné výrobky budou fungovat dlouho. Přece jen, pouze podpory, které fungují perfektně, vám pomohou. Nedodržení pokynů může také omezit záruku.

Povinnost hlášení

Z důvodu regionálních právních předpisů jste povinni okamžitě hlásit jakýkoli vážný incident související s použitím tohoto lékařského prostředku jak výrobcí, tak příslušné autoritě. Naše kontaktní údaje naleznete na zadní straně tohoto letáku.

Likvidace

Výrobek lze likvidovat bez omezení. Pro informace ohledně možností vrácení obalů a zajištění správného recyklace sledujte pokyny ze zprostředkovatelského místa, kde jste tento výrobek zakoupili.

Materiálové složení

Polyamid (PA), Silikon (SI), Polyuretan (PUR), Bavlna (CO), Polyoxymethylen (POM), Polyester (PES), Spandex (EL), Elastodien (ED)

Zdravotnický prostředek – unikátní identifikátor zařízení UDI pomocí kódu DataMatrix

Verze: 2020-06