

THERMO GEL COLD & HOT PACK

Cold&Hot Pack je opakovaně použitelný gelový obklad pro využití léčebné síly tepla a chladu. Balení je včetně textilního obalu. Obsahuje bezpečný netoxický gel, z 99 % biologicky odbouratelný.

Před použitím si přečtěte pokyny:

Použití:

Studený obklad

Účinný při různých druzích bolesti, sekundárních popáleninách, modřinách a otocích, bolestech hlavy a krvácení z nosu.

Příprava studeného obkladu: Obklad bez obalu vložte do mrazáku nebo výrobníku ledu alespoň na 20 minut (trvá minimálně 1 hodinu, než se produkt zmrazí). Po vytažení z mrazáku vložte obklad do textilního obalu.

Nepřikládejte jej přímo na pokožku, může způsobit na citlivé kůži omrzliny. Pokud obklad ponecháte v mrazáku déle než dvě hodiny, může ztuhnout a být obtížně tvarovatelný. V takovém případě jej nechte chvíli rozmrazit, dokud nezměkne a bude opět přizpůsobitelný.

Teplý obklad

Účinný při revmatických bolestech, poskytuje úlevu při svalových bolestech, menstruačních bolestech, při nízkém tlaku, při sportovní terapii a při relaxaci.

Na požadovaném místě ponechte obklad tak dlouho, jak to bude příjemné. Obklad přibližně po 30 minutách potřebuje znovu ohřát pro další použití.

Příprava teplého obkladu: Přiveďte k varu takové množství vody, abyste mohli obklad celý ponořit. Sejměte nádobu s vodou ze zdroje tepla a ponořte obklad do vody na dobu 5–6 minut. Nezahřívejte obklad v mikrovlnné troubě – obklad může prasknout!

Upozornění a údržba

Pokud si nejste jisti, jakou léčbu byste měli užívat, obraťte se na svého lékaře nebo lékárníka.

Po aplikaci omyjte obklad vlažnou vodou a mýdlem, nepoužívejte dezinfekční a jiné čistící roztoky. Při poškození obklad nepoužívejte a zlikvidujte. Při kontaktu s gelovou náplní postižené místo opláchněte vlažnou vodou.

Nepoužívat na otevřené rány a u dětí do 3 let. Pouze k zevnímu použití. Lidé s poruchami cirkulace nebo diabetem by se měli před použitím poradit s lékařem.

Obsah balení

1 kus obklad

1 kus textilní obal

Záruční podmínky

Na výrobek se poskytuje záruční lhůta 24 měsíců od data koupě. V této lhůtě vám rádi odstraníme veškeré poruchy způsobené výrobní vadou nebo chybou materiálu. Záruka se nevztahuje na neodborný zásah, mechanické poškození, nesprávné zacházení s výrobkem, vložení do mikrovlnné trouby nebo dodatečné úpravy výrobku, které vedou k jeho nefunkčnosti.

SANOMED, spol. s r.o., Palackého 75, 612 00 Brno

DIČ: CZ47910127

Tel: 541 422 911, e-mail: objednavky@sanomed.cz

verze 1.1 ze dne 1.4.2025