



Sanomed - 407 **Bederní pás**

Bederní pás určený k účinné podpoře a stabilizaci bederní páteře.



Návod k použití - pás 407

Děkujeme, že jste si vybrali náš bederní pás.

Tento návod vám pomůže pás správně používat.

Informace o účelu použití

Pás je určen pro podporu bederní páteře

Indikace: akutní bolesti při degenerativních a revmatických onemocněních bederní páteře, doléčení po úrazech a operacích bederní páteře kde není potřeba zcela rigidní fixace, akutní bolesti při diskopatiích v oblasti bederní páteře včetně entezopatií, bolesti při spondylolýze a spondylolistéze.

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím bandáže si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poraďte se s lékařem.

Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bandáž čistá a nepoškozená. Vhodnou velikost vyberte pomocí tabulky velikostí. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

Nasazení:

- Zkontrolujte, zda je pás suchý a čistý.
- Ujistěte se, že máte správnou velikost.
- Umístěte pás na záda tak, aby výztuhy byly umístěny ve středu zad.
- Levou a pravou stranu pásu rovnoměrně táhněte dopředu a na břicho je spolu zapněte.
- Oba konce dotahovacích pásku rovnoměrně táhněte a na břicho dle požadované komprese zapněte - zajistíte tak pevné a stabilní přilnutí.
- Pás by neměl omezovat dýchání ani pohyb.

Odložení bandáže:

- Rozepněte suché zipy a sejměte bandáž.
- Zapněte suché zipy pro delší životnost bandáže.

Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme sítku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Skladování

Bandáž skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci ortézy tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.



 SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Česko	MD Medical Device (Zdravotnický prostředek) Materiálové složení: BA, PE	Ohlašovací povinnost: Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.
---	--	--