

Sanomed®

Sanomed 408 Břišní pás

Lehká břišní bandáž je ideální volbou pro podporu ochablých břišních svalů či vazů



www.sanomed.cz



Návod k použití - pás 408

Děkujeme, že jste si vybrali náš pás.

Tento návod vám pomůže pás správně používat.

Informace o účelu použití

Lehká břišní bandáž 408 je ideální volbou pro podporu ochabých břišních svalů či vazů po chirurgických zákrocích nebo při kýlách.

Indikace:

břišní kýly, doléčení po operacích v oblasti břicha, akutní lumbago, funkční poruchy bederní páteře (entezopatie, bolesti atd.)

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím bandáže si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte pás používat a poraďte se s lékařem.

Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je pás čistý a nepoškozený. Vhodnou velikost vyberte pomocí tabulky velikostí. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

Nasazení:

1. Zkontrolujte, zda je pás suchý a čistý.
2. Ujistěte se, že máte správnou velikost.
3. Pás přiložte na záda a bandáž vedte kolem pasu.
4. Obě poloviny břišního pásu táhněte stejnoměrně dopředu a vedte přes sebe a suché zipy spojte pevně na břišní část.
5. Pás by měl podpiřit břišní stěnu, ale neměl by omezovat dýchání ani pohyb.

Odložení pásu:

- Rozepněte suché zipy a sejměte pás.
- Zapněte suché zipy pro delší životnost pásu.

Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- **Perte v ruce při teplotě 30°C.**
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Skladování

Pás skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci ortézy tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.



SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída
240/75 612 00 Brno
Czechia



Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
BA, PE

Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.