



## **Sanomed 408** **Břišní pás**

Lehká břišní bandáž je ideální volbou pro podporu  
ochablých břišních svalů či vazů



# Návod k použití - pás 408

Děkujeme, že jste si vybrali náš pás.

Tento návod vám pomůže pás správně používat.

## Informace o účelu použití

Lehká břišní bandáž 408 je ideální volbou pro podporu ochablých břišních svalů či vazů po chirurgických zákrocích nebo při kýlách.

### Indikace:

břišní kýly, doléčení po operacích v oblasti břicha, akutní lumbago, funkční poruchy bederní páteře (entezopatie, bolesti atd.)

### Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

### Před použitím bandáže si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte pás používat a poraďte se s lékařem.

### Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je pás čistý a nepoškozený. Vhodnou velikost vyberte pomocí tabulky velikostí. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

### Nasazení:

1. Zkontrolujte, zda je pás suchý a čistý.
2. Ujistěte se, že máte správnou velikost.
3. Pás přiložte na záda a bandáž vedte kolem pasu.
4. Obě poloviny břišního pásu táhněte stejnoměrně dopředu a vedte přes sebe a suché zipy spojte pevně na břišní část.
5. Pás by měl podpiřat břišní stěnu, ale neměl by omezovat dýchání ani pohyb.

### Odložení pásu:

- Rozepněte suché zipy a sejměte pás.
- Zapněte suché zipy pro delší životnost pásu.

### Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme síťku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všíte etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

### Skladování

Pás skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci ortézy tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.



|                                                                                                                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>SANOMED, spol. s r.o.<br/>Palackého třída<br/>240/75 612 00 Brno<br/>Czechia</p> | <p><b>MD</b> Medical Device<br/>(Zdravotnický prostředek)</p> <p>Materiálové složení:<br/>BA, PE</p> | <p><b>Ohlašovací povinnost:</b><br/>Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|