



SANOMED 317

Prstová ortéza s dlahou

Ortéza slouží pro stabilní fixaci prstů horní končetiny



Návod k použití – SANOMED 317

Děkujeme, že jste si vybrali naši prstovou ortézu. Tento návod vám ji pomůže správně používat.

Informace o účelu použití:

Prstová ortéza je určena k fixaci 2. - 4. prstu ruky. Stabilizuje prst a okolní klouby, čímž podporuje správné hojení po úrazech, operacích nebo při bolestech a nestabilitě kloubů.

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím ortézy si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte ortézu na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte ortézu používat a poraďte se s lékařem.

Pokyny k nasazení ortézy:

1. Před použitím si důkladně umyjte a osušte ruku.
2. Otevřete zapínání na suchý zíp.
3. Přiložte duralovou dlahu na **dlaňovou nebo hřbetní stranu prstu** – podle doporučení lékaře.
4. Upravte tvar dlahy mírným ohnutím tak, aby kopírovala tvar prstu.
5. Zapněte suché zipy tak, aby ortéza pevně držela, ale netlačila.
6. Zkontrolujte, zda prst zůstává v požadované poloze a že obvaz neomezuje krevní oběh.

Kontrola:

- Zkontrolujte, že prst je stabilizovaný a pohyb je omezen jen v potřebném rozsahu.
- Vyzkoušejte lehké pohyby ostatních prstů - neměly by být omezené.

Upozornění:

- Používejte pouze podle pokynů lékaře.
- Nepřetahujte suché zipy – přílišné utažení může způsobit otlaky nebo poruchu prokrvení.
- Pravidelně kontrolujte stav pokožky pod ortézou. V případě zarudnutí nebo bolesti ortézu ihned sundejte a poraďte se s lékařem.
- Nepoužívejte poškozenou nebo deformovanou ortézu.

Údržba a čištění:

- Ortézu perte ručně vlažnou vodou s jemným mýdlem.
- Nepoužívejte bělidla, aviváže ani chemické čističe.
- Neždímejte, nesusušte v sušičce, nezehlit.
- Sušte volně na vzduchu, mimo přímé sluneční záření nebo zdroj tepla.

Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci ortézy, obsahuje anatomicky vytvarovanou hliníkovou dlahu.



SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída
240/75 612 00 Brno
Czechia



Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
BA, PES, PU, aluminium

Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.