



Sanomed 704 Hallux-valgus noční bandáž

Korektor vbočeného palce pro noční nošení.



Návod k použití – Hallux-valgus bandáž 704

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž. Tento návod vám pomůže pás správně používat.

Informace o účelu použití

Korektor vbočeného palce je speciálně navržen pro noční nošení, aby vaše nohy mohly v klidu odpočívat a zároveň se účinně korigovat.

Indikace:

Hallux valgus, hallux rigidus, bursitis v oblasti MTTPH kloubu, po operaci hallux valgus, konzervativně-funkční terapie vadného postavení palce

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím bandáže si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poraďte se s lékařem.

Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bandáž čistá a nepoškozená. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

Nasazení:

1. Uvolněte suché zip a palcový díl navlečte na palec.
2. Zapněte širší elastický pásek kolem nártu tak, a dobře držel, ale nesmí být příliš těsný.
3. Užší elastický pásek vedte kolem paty a zapněte na nártovém pásku.
4. Tahem tohoto pásku můžete regulovat korekci palce.

Odložení bandáže:

- Rozepněte suché zip a sejměte bandáž.
- Zapněte suché zipy pro delší životnost bandáže.

Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme sítku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Skladování

Bandáž skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci ortézy tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.



 SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia	MD Medical Device (Zdravotnický prostředek) Materiálové složení: bavlna, polyester	Ohlašovací povinnost: Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.
---	--	--