

# Sanomed®

## Foot-UP Peroneální ortéza

Udržuje postavení kotníku ve střední poloze a při kroku zvedá špičku, čímž způsobuje zlepšení chůze.



# Návod k použití - Foot-Up

Děkujeme, že jste si vybrali naši ortézu.

Tento návod vám ji pomůže správně používat.

## Informace o účelu použití

Ortéza upravuje chůzi tak, že zvedá špičku při kroku, čímž zlepšuje stabilitu kroků.

**Indikace:** padavá noha při parézách (n. fibularis, n. ischiadicus)

### Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

### Před použitím si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Pokud váš zdravotní stav souvisí se sníženým krevním oběhem v končetinách, poraďte se se svým lékařem, než ortézu použijete. Mezi takové zdravotní stavy patří mimo jiné diabetes nebo onemocnění periferních cév.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte pás používat a poraďte se s lékařem.

### Pokyny k nasazení / sundání

Ortéza se skládá ze dvou částí - kotníkový díl z vysoce elastického neoprenu se zapíná nad kotníkem, druhá část přes nárt a spojí se přes přezku pomocí suchého zipu. Zvedání špičky je možné regulovat tahem suchého zipu.

### Nasazení:

1. Zapněte kotníkový díl nad kotník tak, aby dobře seděl.
2. Nártový díl zapněte kolem nártu tak, aby přezka byla nohoře.
3. Vsuňte nohu do obuvi a provlečte nártový popruh pod tkaničkami obuvi.
4. Pevně přitáhněte popruh suchým zipem – tím zafixujete správnou pozici špičky, tah si můžete regulovat dle potřeby (např. silnější tah pro výraznější efekt zvedání špičky).

### Sundání:


- Rozepněte suché zipy a sejměte ortézu.
- Zapněte suché zipy pro delší životnost ortézy.

### Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladi. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

### Skladování

Ortézu skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci pásu tím, že jej nebudete skládat nebo přetěžovat.

 <p>SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia</p>	<p><b>MD</b> Medical Device (Zdravotnický prostředek)</p> <p>Materiálové složení: BA, PE</p>	<p><b>Ohlašovací povinnost:</b> Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.</p>
---	--	--