

Sanomed®

SANOMED 204

Ramenní bandáž



www.sanomed.cz



Návod k použití - ramenní bandáž - typ 204

Děkujeme, že jste si vybrali náš ramenní bandáž.

Tento návod vám ji pomůže správně používat a udržovat pro dosažení co nejlepších výsledků.

Informace o účelu použití

Bandáž je navržena k mírné fixaci lehkých nestabilit ramenního kloubu, doléčení po operacích, pórúrazových a revmatických stavech v oblasti ramene. Slouží jako podpurná pomůcka, nenahrazuje odborné lékařské vyšetření nebo léčbu při závažných poraněních.

Indikace: algické stavy při degenerativních a revmatických onemocněních ramenního kloubu, impingement syndrom, entezopatie v oblasti ramene, doléčení po operacích ramene, lehké nestability ramene.

Kontraindikace a upozornění:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené nebo infikované rány či podrážděnou kůži.
- Nepoužívejte při známých kožních onemocněních bez konzultace s lékařem.
- Pokud při nošení pocítíte bolest, necitlivost, mravenčení nebo jiné nepříjemné příznaky, bandáž ihned sundejte a konzultujte stav s lékařem.
- Před dlouhodobým nebo léčebným použitím konzultujte použití s odborníkem (lékařem nebo fyzioterapeutem).
- Bandáž není určena pro celodenní nošení bez přestávek, doporučuje se střídání používání.

Pokyny k nasazení / sundání:

Nasazení:

1. Zkontrolujte, zda je bandáž suchá a čistá.
2. Rozepněte suché zipy a nasuňte bandáž na postiženou končetinu.
3. Upravte polohu tak, aby bandáž na rameno a biceps přiléhala rovnoměrně bez výrazných záhybů.
4. Napněte elastický popruh a zapněte v protilehlém podpaží.
5. Upravte polstrování v podpaží tak, aby popruh, případně zapínání netlačilo.
6. Pásky na bicepsu zapněte tak, aby bandáž neškrtila, ale zároveň držela dostatečně pevně.

Doporučení k nošení

- Doporučeno nosit na holém těle nebo přes tenké oblečení.
- Používejte pravidelně v rozumném režimu — bandáž podporuje stabilitu, není určena k trvalému, nepřetržitému nošení.

Sundání:

Uvolněte suché zipy a sundejte bandáž pás z paže. Zapněte suché zipy pro delší životnost bandáže.

Údržba a čištění:

- Před praním zapněte všechny suché zipy.
- Perte ručně nebo v pračce v jemném pracím programu při 30 °C. Doporučujeme vložení bandáže do prací sítky.
- Používejte jemný prací prostředek; nepoužívejte bělidla, agresivní čisticí prostředky ani rozpouštědla.
- Nežehlit, nesušit v sušičce, nevystavovat přímému zdroji tepla ani přímému slunečnímu záření.
- Sušte rozložené na rovnom povrchu, aby nedošlo k deformaci.
- Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě výrobku.

Skladování:

Skladujte na suchém a chladném místě mimo přímé sluneční světlo. Zabraňte deformaci bandáže tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.



SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída
240/75 612 00 Brno
Czechia



Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
PAD, Elastan, neopren

Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.