

Sanomed®

SANOMED 313

Dynamická prstová ortéza



www.sanomed.cz



Návod k použití – SANOMED 313

Děkujeme, že jste si vybrali naši prstovou ortézu. Tento návod vám ji pomůže správně používat.

Informace o účelu použití:

Prstová ortéza pooperační a poúrazové stavy prstů horní končetiny, kde je nezbytná postupná rehabilitace, pro obnovu flexorů prstů ruky a zajištění dynamické extenze v PIP a MCP kloubu.

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím ortézy si přečtete všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte ortézu na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pociťíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte ortézu používat a poradte se s lékařem.

Pokyny k nasazení ortézy:

1. Umyjte a osušte ruku a prst.
2. Ortézu otočte tak, aby byly peloty otočené směrem k dlaňové straně prstu.
3. Jemně roztáhněte peloty (jsou pružné).
4. Vsouvejte prst mezi všechny tři peloty najednou.
5. Nechte prst zajat až tak, aby: distální pelota (nejbližší nehtu) seděla těsně za DIP kloubem, střední pelota ležela přes střední článek (PIP kloub), proximální pelota seděla u báze prstu / přes MCP kloub
6. Ortéza by měla lehce tlačit, ale nesmí zařezávat ani způsobovat bílé skvrny na kůži po 5–10 minutách.
7. Zkontrolujte, zda při pokusu o sevření prstu (flexe) ortéza vytváří jemný odpor a pomáhá prst natahovat zpět (dynamická extenze).

Kontrola:

Po nasazení proveďte jednoduchý test:

1. Pokrčte prst → měli byste cítit jemný tah, který prst vrací zpět do natažení.
2. Pokud se prst ohne příliš snadno → ortéza je příliš volná (nebo špatně nasazená).
3. Pokud se prst skoro neohne → ortéza je příliš těsná → sundejte ji a zkuste znovu, případně menší velikost nebo konzultace s fyzioterapeutem.

Upozornění:

- Používejte pouze podle pokynů lékaře.
- Pravidelně kontrolujte stav pokožky pod ortézou. V případě zarudnutí nebo bolesti ortézu ihned sundejte a poradte se s lékařem.
- Nepoužívejte poškozenou nebo deformovanou ortézu.

Údržba a čištění:

- Ortézu otřete vlhkým hadříkem s jemným mýdlem nebo dezinfekčním prostředkem.
- Nepoužívejte bělidla, aviváže ani chemické čističe.
- Sušte volně na vzduchu, mimo přímé sluneční záření nebo zdroj tepla.

Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla.



SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída
240/75 612 00 Brno
Czechia



Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
Polypropylen, pružinová ocel

Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.