

# Sanomed®

## **SANOMED 101** **Anatomický krční límec**

Anatomický krční molitanový límec je navržen pro stabilizaci krku a udržení tepla, což pomáhá zmírnit napětí krčních svalů a ulevit od bolesti.



[www.sanomed.cz](http://www.sanomed.cz)



# Návod k použití – krční límec typ 101

Děkujeme, že jste si vybrali náš krční límec.

Tento návod vám pomůže límec správně používat.

## Informace o účelu použití

Krční límec slouží k dočasnému znehybnění krční páteře. Používá se při bolestech krční páteře, po úrazech, při degenerativních změnách nebo po operacích.

### Indikace:

akutní bolesti při degenerativních onemocněních krční páteře, doléčení po úrazech a operacích krční páteře, diskopatie, akutní tortikolis

### Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

## Před použitím límce si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Ověřte, že máte správnou velikost. Límec by měl podepírat bradu a sahat až ke klíční kosti, bez nadměrného tlaku.
- V případě pochybností o vhodné velikosti se poraďte s lékařem nebo fyzioterapeutem.

## Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je límec čistý a nepoškozený. Vhodnou velikost vyberte pomocí tabulky velikostí. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

### Nasazení:

1. Límec přiložte pod bradu tak, aby anatomicky tvarovaný výřez přesně seděl pod dolní čelistí.
2. Zadní část límce obepne krk zezadu.
3. Upevněte límec pomocí suchého zipu v zadní části.
4. Límec by měl být pohodlný - neměl by omezovat dýchání ani polykání.
5. Límec noste po dobu doporučenou lékařem - často po dobu několik týdnů po zranění nebo operaci krční páteře.

### Odložení bandáže:



- Chcete-li límec odložit, rozepněte suché zipy a sejměte jej.
- Pak zipy pro delší životnost bandáže zapněte.

### Údržba a čištění:

- Límec je vyroben z pěnového materiálu s textilním potahem.
- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme síťku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

### Skladování

Bandáž skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabráňte deformaci ortézy tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.

|   |  |  |
|---|--|--|
|  <p>SANOMED, spol. s r.o.<br/>Palackého třída 240/75<br/>612 00 Brno<br/>Czechia</p> | <p> <b>Medical Device</b><br/>(Zdravotnický prostředek)</p> <p>Materiálové složení:<br/>BA, PU, PES</p> | <p><b>Ohlašovací povinnost:</b><br/>Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.</p> |
|---|--|--|