

Sanomed®

SANOMED 710 **Pooperační bota**

Pooperační bota k ochraně a stabilizaci
nohy po chirurgických zákrocích



www.sanomed.cz



Návod k použití – SANOMED 710

Děkujeme, že jste si vybrali naši pooperační botu.

Tento návod vám pomůže botu správně používat.

Informace o účelu použití

Bota slouží k ochraně a stabilizaci nohy po chirurgických zákrocích, při poraněních, zlomeninách prstů nebo po odstranění sádry.

Indikace:

Hallux valgus, hallux rigidus, digitus hamatus, diabetes

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím boty si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- **Botu je určena k dočasnému nošení** během rehabilitace - není určená k dlouhodobému používání jako běžná obuv
- **Nepoužívejte botu při sportu ani v dešti** - podrážka není protiskluzová

Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bota čistá a nepoškozená. Vhodnou velikost vyberte pomocí tabulky velikostí. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

Nasazení:

1. Ujistěte se, že je noha suchá a případná bandáž správně nasazená.
2. Pokud je noha čerstvě operována, nasazujte botu dle doporučení lékaře.
3. Položte nohu do boty tak, aby pata seděla až na konec patní části.
4. Ujistěte se, že prsty nevyčnívají nebo jsou sevřené.
5. Zapněte rovnoměrně suché zipy tak, aby bota dobře držela, ale netlačila.
6. Projděte se několik kroků a zkontrolujte, zda je noha pevně fixována a bota nesklouzává.

Odložení boty:


- Chcete-li botu sundat, rozepněte suché zipy a sejměte ji.
- Pak zipy pro delší životnost boty zapněte.

Údržba a čištění:

- Botu otírejte vlhkým hadříkem a nechte volně uschnout.
- Neperte v pračce a nevystavujte přímému zdroji tepla (radiátor, fén..).
- V případě silného znečištění doporučujeme použití jemného mýdla a opláchnutí vodou.

Skladování

Botu skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci boty tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.

 <p>SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia</p>	<p>MD Medical Device (Zdravotnický prostředek)</p> <p>Materiálové složení: BA, PES, PU,PAD, EVA</p>	<p>Ohlašovací povinnost: Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.</p>
---	--	--