

NÁVOD K OBSLUZE

Deska na vanu Meyra

3012902 - délka 69 cm

3012912 - délka 74 cm

POPIS

Vanovou sedačku s gumovými stavěcími nožkami můžete nastavit na všechny běžně prodávané šířky vany.

Pro bezpečné používání tohoto výrobku si před prvním použitím přečtěte tento montážní návod a návod k použití a dodržujte ho.

Předpokladem pro uznání nároků z ručení resp. záruky je v každém případě používání výrobku podle účelu určení, používání originálních náhradních dílů a pravidelné provádění údržby a prohlídek.

POUŽITÍ

Tento výrobek slouží osobám s omezenou mobilitou k usnadnění koupele.

Vanová sedačka je dimenzována na maximální hmotnost uživatele 130 kg.

Vnitřní rozměr na horním okraji vany nesmí překročit vnitřní rozměr uvedený v technických údajích.

KONTRAINDIKACE

- Neschopnost udržení vzpřímené pozice.
- Poruchy koordinace a vnímání.
- Použití pomůcky vždy konzultujte s lékařem.

KONTROLA PŘI PŘEVZETÍ

Výrobek celý vybalte a zkontrolujte zásilku, zda je kompletní a nevykazuje poškození způsobené dopravou.

Pokud byste zjistili, že výrobek nebo zásilka má nějakou vadu:

1. neprodleně reklamujte u dopravce,
2. nechejte škodu/vadu zaprotokolovat,
3. neprodleně informujte nás nebo svého prodejce.

ROZSAH DODÁVKY

Vanová sedačka:

- (1) 1x sedací deska
 - (2) 2x gumová stavěcí nožka
 - (3) 2x šroub
- 1x návod k montáži a použití




MONTÁŽ

1. Gumové stavěcí nožky namontujte pod sedačku.
2. Upevňovací šrouby prostrčte shora podélnými otvory ve vanové sedačce a zašroubujte je do gumových stavěcích nožek jenom natolik, aby se jimi ještě dalo posouvat.
3. Sedačku položte příčně přes vanu držadlem ke stěně a přisuňte ji k okraji vany.
4. Zajistěte, aby okraj sedačky ležel dostatečně daleko na okraji vany.
5. Gumové stavěcí nožky posuňte proti okraji vany natolik, aby přiléhaly k vaně a netlačily na ni.
6. Gumové stavěcí nožky ručně utáhněte.
7. Vanová sedačka je připravena k použití.

BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Přestože konstrukce je stabilní, jednotlivé konstrukční díly podléhají určitému opotřebení. Proto doporučujeme nechat výrobek každých 6 měsíců prohlédnout odborníkem.

- Nikdy nepřekračujte nosnost sedačky.
 - Před použitím zkontrolujte, zda je sedačka na vaně správně usazená!
 - Dbejte na to, aby vanová sedačka ležela dostatečně daleko na okraji vany!
 - Pravidelně kontrolujte správné nastavení gumových stavěcích nožek!
 - Před použitím stavěcí nožky ručně utáhněte!
 - Seděte si vždy do středu sedací plochy!
 - Opírejte se o vanovou sedačku pouze ve svislém směru.
 - Nestoupejte si na sedací plochu nohama.
- Nebezpečí úrazu!**
- Před použitím se přesvědčte, zda je produkt v bezvadném stavu.
 - Opotřebenou, zkřehlou vanovou sedačku nenarovnávejte a již nepoužívejte.
 - Mýdlo a sprchové gely zvyšují nebezpečí uklouznutí!
 - Po očištění zkontrolujte správnou funkci vanové sedačky!
 - Opotřebenou nebo poškozenou sedačku okamžitě vyměňte.
 - Opotřebené nebo poškozené gumové stavěcí nožky okamžitě vyměňte. **Nebezpečí úrazu!**

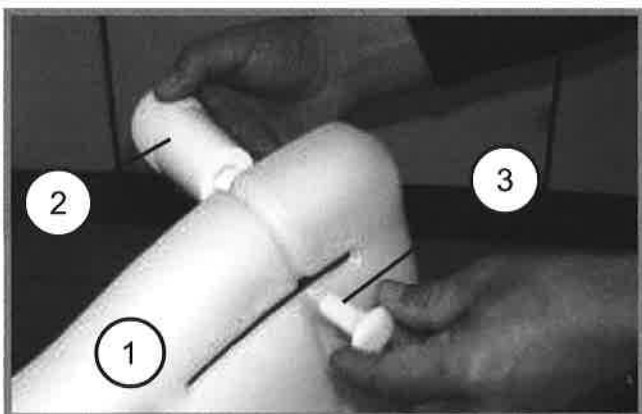

PÉČE A ÚDRŽBA

- Sedačku pravidelně čistěte běžnými čisticími prostředky.
- K čištění nepoužívejte rozpouštědla či ostré předměty. Doporučujeme sedačku každých 6 měsíců nechat zkontrolovat servisním technikem prodejce.
- Jestliže výrobek používá více osob (např. v pečovatelském zařízení), je předepsaná aplikace běžných dezinfekčních prostředků.
- Likvidaci sedačky je třeba provést v souladu s národními zákonnými předpisy.



Tento výrobek je ve shodě se směrnicí ES 93/42/EHS pro zdravotnické prostředky.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Model:	3012902	3012912
Délka:	69 cm	74 cm
Šířka:	29 cm	29 cm
Vnitřní rozměr vany - horní okraj min.:	48 cm	53 cm
- spodní okraj max.:	59 cm	64 cm
Materiál:	HDPE (polyetylén)	HDPE (polyetylén)
Hmotnost:	2,1 kg	2,4 kg
Nosnost:	130 kg	130 kg
Teplota vody:	80°C	80°C
Barva:	bílá	bílá

Výrobce:

MEYRA GmbH
Meyra-Ring 2
D-32689 Kalletal-Kalldorf
www.meyra.de

Distributor:

MEYRA ČR s.r.o.
Hrusická 2538/5
141 00 Praha 4 - Spořilov
www.meyra.cz