

Sanomed®

SANOMED 302 **Elastická zápěstní páska**

Elastická bandáž k lehké fixaci a
podpoře zápěstního kloubu.



www.sanomed.cz



Návod k použití – SANOMED 302

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž. Tento návod vám ji pomůže správně používat.

Informace o účelu použití:

- lehká fixace a podpora zápěstního kloubu,
- odlehčení šlach a svalů při přetížení,
- zmírnění bolesti při drobných úrazech, zánětech nebo přetížení
- vhodná při sportovních aktivitách nebo opakovaných manuálních činnostech.

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím bandáže si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené rány, ekzémy nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poradte se s lékařem.

Pokyny k nasazení / sundání

1. Příprava:

- Bandáž nasazujte na čistou, suchou kůži.
- Ujistěte se, že páska není poškozená nebo znečištěná.

2. Nasazení:

- Vložte palec do otvoru pásky a omotáním pásku utáhněte kolem zápěstí.
- Utáhněte suchý zip tak, aby páska dobře seděla, ale neomezovala krevní oběh.

3. Kontrola:

- Zkontrolujte, zda máte volný pohyb prstů a páska příjemně fixuje zápěstí.
- V případě nepohodlí pásku upravte nebo povolte.

Délka nošení:

- Používejte dle potřeby nebo doporučení lékaře.
- Při sportu nebo manuální práci ji noste po dobu zátěže, poté sundejte, aby nedošlo k omezení prokrvení.

Sundání bandáže:


- Rozepněte suchý zip a sejměte ji.
- Pak zip pro delší životnost bandáže zapněte.

Údržba a čištění:

- Perte ručně ve vlažné vodě (max. 30°C) s jemným pracím prostředkem
- Neždímejte, nesušte v sušičce ani na přímém slunci.
- Nežehlete

Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla a vlhkosti.

 <p>SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia</p>	<p>MD Medical Device (Zdravotnický prostředek)</p> <p>Materiálové složení: BA, PES</p>	<p>Ohlašovací povinnost: Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.</p>
---	---	--