

# Sanomed®

## SANOMED 307

### Zápěstní neoprénová páska

Elastická bandáž k lehké fixaci a podpoře zápěstního kloubu.



# Návod k použití – SANOMED 307

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž. Tento návod vám ji pomůže správně používat.

## Informace o účelu použití:

- lehká fixace a podpora zápěstního kloubu,
- odlehčení šlach a svalů při přetížení,
- zmírnění bolesti při drobných úrazech, zánětech nebo přetížení
- vhodná při sportovních aktivitách nebo opakovaných manuálních činnostech.

## Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

## Před použitím bandáže si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené rány, ekzémy nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poradte se s lékařem.

## Pokyny k nasazení / sundání

### 1. Příprava:

- Bandáž nasazujte na čistou, suchou kůži.
- Ujistěte se, že páska není poškozená nebo znečištěná.

### 2. Nasazení:

- Přiložte pásku na požadované místo na zápěstí a omotáním pásku utáhněte kolem zápěstí.
- Utáhněte suchý zip tak, aby páska dobře seděla, ale neomezovala krevní oběh.

### 3. Kontrola:

- Zkontrolujte, zda máte volný pohyb prstů a páska příjemně fixuje zápěstí.
- V případě nepohodlí polohu pásky upravte nebo povolte.

## Délka nošení:

- Používejte dle potřeby nebo doporučení lékaře.
- Při sportu nebo manuální práci ji noste po dobu zátěže, poté sundejte, aby nedošlo k omezení prokrvení.

## Sundání bandáže:

- Rozepněte suchý zip a sejměte ji.
- Pak zip pro delší životnost bandáže zapněte.

## Údržba a čištění:

- Perte ručně ve vlažné vodě (max. 30°C) s jemným pracím prostředkem.
- Neždímejte, nesušte v sušičce ani na přímém slunci.
- Nežehlete.

## Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla a vlhkosti.



SANOMED, spol. s r.o.  
Palackého třída  
240/75 612 00 Brno  
Czechia



Medical Device  
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:  
BA, PE, neopren

### Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.