

Sanomed®

SANOMED 316 **Ortéra palce De Quervain**

Semirigidní palcová ortéra pro
fixaci MCP kloubu palce.



www.sanomed.cz



Návod k použití – SANOMED 316

Děkujeme, že jste si vybrali naši ortézu palce. Tento návod vám ji pomůže správně používat.

Informace o účelu použití:

- stabilizaci palce ruky při syndromu de Quervain (zánět šlach a šlachových pochev palce),
- odlehčení šlach a kloubů palce při přetížení,
- použití po lehkých úrazech, zánětech nebo operacích palce,
- omezení bolestivých pohybů a podporu hojení.

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím ortézy si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte ortézu na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte ortézu používat a poradte se s lékařem.

Pokyny k nasazení / sundání

Příprava:

- Ortézu nasazujte na čistou, suchou kůži.
- Zkontrolujte, že suché zipy jsou rozepnuté.

Nasazení:

- Vsuňte palec do palcové části ortézy.
- Zbýlá část ortézy by měla přiléhat k zápěstí a hřbetu ruky.

Dotazení:

- Zapněte pásky se suchým zipem postupně: nejprve kolem zápěstí, poté okolo palce.
- Ortéza by měla být pevná, ale nesmí škrtit ani způsobovat bolest.
- V palcové části je hliníková dlahu, kterou je možné tvarovat a tím si přesněji usadit ortézu na palci

Kontrola:

- Zkontrolujte, že palec je stabilizovaný a pohyb je omezen jen v potřebném rozsahu.
- Vyzkoušejte lehké pohyby prstů – neměly by být omezené.

Odložení ortézy:

- Rozeptejte suché zipy a sejměte ji.
- Pak zipy pro delší životnost ortézy zapněte.

Údržba a čištění:

- Perte ručně ve vlažné vodě (max. 30°C) s jemným pracím prostředkem
- Neždímejte, nesušte v sušičce ani na přímém slunci.
- Nežehlete

Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci ortézy, obsahuje anatomicky vytvarovanou hliníkovou dlahu.



SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída
240/75 612 00 Brno
Czechia



Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
BA, PES, PU, aluminium

Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.