

Sanomed®

Sanomed 420 **Pás kýlní dětský pupeční**

Zdravotní pomůcka k ošetření při pupeční kýle.



www.sanomed.cz



Návod k použití – pás kýlní dětský pupeční 420

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž.

Tento návod vám pomůže pás správně používat.

Informace o účelu použití

Pás je určen pro podporu a prevenci pupeční kýly před chirurgickým zákrokem.

Jednoduchý dětský elastický kýlní pás je vybaven pelotou, která tlačí na kýlu a zabraňuje jejímu rozvíutí. Speciální pelota vyvíjí tlak na pupeční kýlu, což pomáhá tlačít zpět povolenou tkáň. Tento kýlní pás je ideálním řešením pro děti trpící kýlou jako jednoduché a účinné řešení pro prevenci rozvinutí kýly.

Indikace:

ošetření při pupeční kýle

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím bandáže si přečtete všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte pás na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte pás používat a poraďte se s lékařem.

Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bandáž čistá a nepoškozená. Vhodnou velikost vyberte pomocí tabulky velikostí – pás je univerzální pro obvod v pase 30–70 cm. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

Nasazení:

1. Uvolněte suchý zip a přiložte pás kolem břicha tak, aby pelota (polštářek) tlačila na pupeční kýlu
2. Pás zapněte tak, a dobře držel, ale nesmí být příliš těsný.

Odložení bandáže:


- Rozepněte suchý zip a sejměte bandáž.
- Zapněte suché zipy pro delší životnost bandáže.

Údržba a čištění:

- Před praním sejměte pelotu (polštářek) z pásu.
- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme sítku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Skladování

Bandáž skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci ortézy tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.

 <p>SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia</p>	<p>MD Medical Device (Zdravotnický prostředek)</p> <p>Materiálové složení: 40 % bavlna, 20 % latex, 20 % polyester</p>	<p>Ohlašovací povinnost: Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.</p>
---	---	--