

Sanomed®

SANOMED 304 **Ortéra zápěstí s výztuhou**

Ortéra slouží pro fixaci zápěstí



www.sanomed.cz



Návod k použití – SANOMED 304

Děkujeme, že jste si vybrali naši zápěstní ortézu. Tento návod vám ji pomůže správně používat.

Informace o účelu použití:

Ortéza je určena pro fixaci zápěstí a palce s lehkou až střední zátěží. Poskytuje podporu po úrazech nebo v rekonvalescenci, kdy je nutná fixace zápěstí, a to při zachování určité mobility.

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím ortézy si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte ortézu na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte ortézu používat a poraďte se s lékařem.

Pokyny k nasazení ortézy:

1. Před použitím si důkladně umyjte a osušte ruku.
2. Zvolte správnou velikost ortézy podle obvodu zápěstí
3. Otevřete zapínání na suchý zip.
4. Vložte ruku do ortézy tak, aby palec prošel otvorem pro palec a zápěstí bylo opřeno o spodní část ortézy, kde se nachází anatomicky tvarovaná dlahu.
5. Pokud je potřeba, upravte tvar dlahy mírným ohnutím tak, aby ortéza vyhovovala požadované fixaci.
6. Uchopte suchý zip, natáhněte tím šněrování a obtočte kolem zápěstí tak, aby ortéza pevně držela, ale netlačila.
7. Po nasazení a utažení ortézy zkontrolujte, zda je ruka pohodlně upevněná a zda poskytuje potřebnou oporu

Odložení ortézy:

Chcete-li ortézu odložit, rozepněte suchý zip a povolte šněrování. Zápěstí vysuňte s ortézy.

Upozornění:

- Používejte pouze podle pokynů lékaře.
- Přílišné utažení může způsobit otoky nebo poruchu prokrvení.
- Pravidelně kontrolujte stav pokožky pod ortézou. V případě zarudnutí nebo bolesti ortézu ihned sundejte a poraďte se s lékařem.
- Nepoužívejte poškozenou nebo deformovanou ortézu.


Údržba a čištění:

- Ortézu perte ručně vlažnou vodou s jemným mýdlem.
- Nepoužívejte bělidla, aviváže ani chemické čističe.
- Neždímejte, nesušte v sušičce, nežehtit.
- Sušte volně na vzduchu, mimo přímé sluneční záření nebo zdroj tepla.

Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci ortézy, obsahuje anatomicky vytvarovanou hliníkovou dlahu.



 <p>SANOMED, spol. s r. o. Palackého třída 240/75, 612 00 Brno Czechia</p>	<p>MD Medical Device (Zdravotnický prostředek)</p> <p>Materiálové složení: BA, PES, PU, aluminium</p>	<p>Ohlašovací povinnost: Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.</p>
---	--	--