

Sanomed®

SANOMED 510 **Infrapatelární bandáž**

Bandáž pro stabilizaci a
odlehčení česky.



www.sanomed.cz



Návod k použití – SANOMED 510

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž.

Tento návod vám ji pomůže správně používat.

Informace o účelu použití:

Bandáž poskytuje stabilizaci a odlehčení kolenního kloubu, což může výrazně zmírnit bolest při různých činnostech, jako je běhání, skákání nebo chůze. Tlaková pelota v bandáži podpírá česku, fixuje její dráhu a rovnoměrně tlačí na šlachy pod ní. Páska se jednoduše nasazuje a zapíná na suchý zip.

Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bandáž čistá a nepoškozená. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poradte se s lékařem.

Pokyny k nasazení ortézy:

- Bandáž lze nosit na levém i pravém koleni.
- Uvolněte suchý zip.
- Umístěte pelotu pod střed česky.
- Utáhněte pásku pod kolenem tak, abyste vytvořili požadovaný tlak na patelární šlachy.
- Tlak si můžete individuálně přizpůsobovat, nesmí to být přitom nepříjemné.

Délka nošení:

Začněte na 15 - 30 minutách a postupně dobu prodlužujte dle potřeby.

Odložení bandáže:


- Rozepněte suchý zip a sejměte bandáž.
- Zip pro delší životnost zapněte.

Údržba čištění

- Perte ručně ve vlažné vodě (max. 30°C) s jemným pracím prostředkem.
- Neždímejte, nesušte v sušičce ani na přímém slunci.
- Nežehlete.

Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci ortézy, obsahuje anatomicky vytvarovanou silikonovou pelotu.

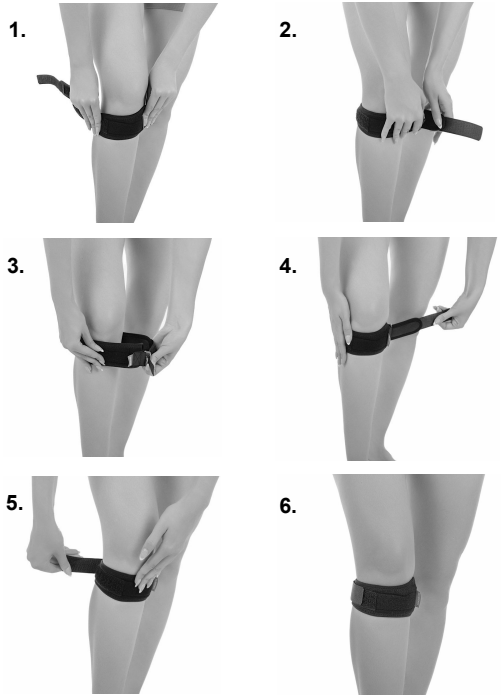

SANOMED, spol. s r.o.
Palackého třída
240/75 612 00 Brno
Czechia



Medical Device
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:
Neopren, PA, PE, silikon

Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.