

# Sanomed®

## Sanomed 422 Jednostranný kýlní pás

Tento pás je praktickým a efektivním řešením pro pacienty s jednostrannou kýlou, kteří hledají pohodlné a snadno použitelné opatření pro prevenci a léčbu kýly v oblasti třísla.



[www.sanomed.cz](http://www.sanomed.cz)



# Návod k použití – kýlní tříselní pás 422

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž.

Tento návod vám pomůže pás správně používat.

## Informace o účelu použití

Pás je určen pro podporu a prevenci tříselné kýly před a po chirurgickém zákroku.

## Indikace:

oboustranná tříselná kýla, předoperační nošení

## Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

## Před použitím bandáže si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poraďte se s lékařem.

## Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bandáž čistá a nepoškozená. Vhodnou velikost vyberte pomocí tabulky velikostí. První nasazení by mělo proběhnout za přítomnosti odborného pracovníka.

## Nasazení:

1. Před přiložením kýlního pásu tuto kýlu zmenšete. Za tímto účelem doporučujeme se položit na záda a kýlu masírovat.
2. Uvolněte všechny suché zipy a přiložte pás kolem kyčlí. Pás zapněte tak, a dobře držel, ale nesmí být příliš těsný.
3. Upravte si nastavení a délku stehenního pásu.
4. Zkontrolujte, zda pelota (polštářek) je řádně umístěn na kýle v poloze ve stoje.
5. V případě potřeby upravte utažení

## Odložení bandáže:


- Rozepněte suché zipy a sejměte bandáž.
- Zapněte suché zipy pro delší životnost bandáže.

## Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme síťku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

## Skladování

Bandáž skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci ortézy tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.

 <p>SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia</p>	<p><b>MD</b> Medical Device (Zdravotnický prostředek)</p> <p>Materiálové složení: 40 % bavlna, 20 % latex, 20 % polyester</p>	<p><b>Ohlašovací povinnost:</b> Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.</p>
---	---	--