

Sanomed®

Sanomed 202 Epikondylární páska

Epikondylární neoprenová páska se silikonovou pelotou je určena k léčbě bolestivých syndromů v oblasti lokte, jako jsou tenisový nebo golfový loket.



Velikost

UNI



www.sanomed.cz

Návod k použití epikondylární pásky - 202

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž. Tento návod vám pomůže správně používat a udržovat bandáž pro dosažení nejlepších výsledků.

Informace o účelu použití

Tato epikondylární neoprenová páska typ se silikonovou pelotou je navržena k léčbě bolestivých syndromů v oblasti lokte, jako jsou tenisový nebo golfový loket

Indikace:

entezopatie v oblasti lokte (tenisový, golfový nebo oštěpařský loket).

Kontraindikace:

V současné době nejsou žádné známy.

Před použitím bandáže si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Používejte bandáž pouze podle pokynů vašeho lékaře nebo fyzioterapeuta.
- Nepoužívejte bandáž na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poradte se s lékařem.

Pokyny k nasazení / sundání

Před nasazením bandáže si zkontrolujte, že je čistá a nepoškozená.

Nasazení:

1 – Pásku je možné nosit na levé i pravé ruce.

2 – Rozepnutou páskou obehněte předloktí asi 4-6 cm pod loktem.

3 – Silikonová pelota by měla být umístěna v případě tenisového lokte na vnější straně lokte jako na obrázku (přední strana)

4 - Poté pásku provlečte kovovým okem.

5 – Zatněte ruku v pěst a pásku utáhněte. Dbejte na to, aby se páska nepootočila a suchý zip zapněte.

6 – Páska by na paži měla držet pevně, aniž by klouzala nebo se rozepínala.

Sundání:


Uvolněte suché zipy a sundejte bandáž z ruky. Suchý zip znovu zapnete, čím prodloužíte životnost pásky.

Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek a doporučujeme síťku na praní.
- Zapněte všechny suché zipy.
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na etiketě všíte na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Doba použití / životnost výrobku

Životnost zdravotnické prostředku je určena přirozeným opotřebením při řádné a vhodné manipulaci.

 <p>SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia</p>	<p>MD Medical Device (Zdravotnický prostředek)</p> <p>Materiálové složení: Neopren, silikon.</p>	<p>Ohlašovací povinnost: Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.</p>
---	---	--