

# Sanomed®

## Rigidní kolenní ortéza 551 Rigidní ortéza 20°



[www.sanomed.cz](http://www.sanomed.cz)



# Návod k použití

## Rigidní kolenní ortéza - 551

Děkujeme, že jste si vybrali naši kolenní ortézu. Tento návod vám ji pomůže správně používat.

### Informace o účelu použití

Ortéza rigidní rovná je určena k doléčení kolene vyžadující rigidní fixaci kolene ve flexi 20°. Díky využití moderních syntetických vláken je tato bandáž prodyšná, odvádí vlhkost a teplo, čímž efektivně snižuje pocení.

**Indikace:** doléčení po operacích kolene vyžadující rigidní fixaci ve flexi, úrazy kolene vyžadující rigidní fixaci ve flexi, (parciální léze postranních vazů, lehké distorze), dočasná fixace kolene po úraze před operací.

### Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

### Před použitím bandáže si přečtěte všechny bezpečnostní pokyny:

- Nepoužívejte bandáž na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku.
- Pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poraďte se s lékařem.

### Pokyny k nasazení / sundání

První poučení by mělo být provedeno pod dohledem odborného pracovníka

#### Jak bandáž nasadit – krok za krokem

1. Posadte se na lůžko a uvolněte nohu; ideálně mírně pokrčte koleno (cca 10–20°).
2. Přiložte ortézu tak, aby fixační dlahy v zadní části ortézy ležely uprostřed pod kolénem.
3. Postranní díly nastavte individuálně dle obvodu nohy, jsou připevněny pomocí velcra.
4. Postranní díly ortézy zapněte tak, aby česka byla uprostřed otvoru.
5. Začněte dotahovat pásky kolem kolene. Začněte nejprve pásky nad a pod kolénem, pak zapněte prostřední pásky nad a pod kolénem, nakonec zapněte krajní pásky na stehně a lýtku.

### Doporučení pro nošení


- První nasazení ortézy by mělo být pod dohledem odborníka.
- Pokud se objeví bolest, otoky nebo necitlivost, poraďte se s lékařem.
- Podmínkou správné funkce ortézy je správné nasazení.

### Údržba a čištění:

- Před praním vyjměte fixační dlahu a zapněte suché zipy.
- Používejte jemný prací prostředek
- Výrobek nikdy nevystavujte přímému působení tepla/chladu. Respektujte pokyny k péči uvedené na všité etiketě na horním okraji produktu.
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Perte v ruce nebo v pračce při teplotě 30°C.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

### Skladování

Skladujte na suchém a chladném místě mimo dosah přímého slunečního světla. Zabraňte deformaci bandáže tím, že ji nebudete skládat nebo přetěžovat.

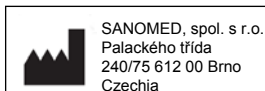

SANOMED, spol. s r.o.  
Palackého třída  
240/75 612 00 Brno  
Czechia

**MD** Medical Device  
(Zdravotnický prostředek)

Materiálové složení:  
PUR, PAD, BA, PES

### Ohlašovací povinnost:

Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.