

## 3055 Easy strong

### **SANUS ANATOMIC — VLOŽKA S SENDVIČOVOU STRUKTUROU, ZDRAVOTNICKÝ PROSTŘEDEK**

#### **Účel nošení zdravotnické vložky**

Vložka slouží k léčbě již vzniklého plochého chodidla zvednutím zřícených kleneb na jejich anatomicky správnou výšku. Zajištěním správného anatomického postavení chodidla pomáhá předcházet nebo odstraňovat bolesti způsobené nesprávným držením těla a sekundární komplikace, jako jsou kladívkové prsty, plantární fasciitida a v důsledku toho i patní ostruha (calcaneální ostruha).

#### **Určená (pacientská) skupina / Indikace**

Indikace: získané flexibilní ploché nohy — stadium I a časné stadium II.

#### **Kontraindikace**

- Rigidní (tuhé) ploché nohy.
- Použití pomůcky bez předpisu specialisty (ortopeda) je kontraindikováno.

#### **Návod k použití**

Vložku ve správné velikosti (vybranou za součinnosti ortopedického specialisty) vložte do obuvi a používejte po celý den. Nošení ponožek je nutné, aby se předešlo podráždění kůže způsobenému pocením. V případě potřeby vložku čistěte. Pokud bude po nasazení potřeba dodatečná korekce vložky, personál ji rád provede bezplatně — doba záruky/užívání je 1 rok od data zakoupení.

#### **Konstrukční vlastnosti vložky**

Flexibilní vložka pro ploché nohy s perforovaným potahem, podporou příčné i podélné klenby a miskovitým provedením paty. Pružná odrazová plocha zajišťuje vysoký komfort při chůzi; perforovaná struktura umožňuje ventilaci chodidla. Zvednutím příčné a podélné klenby společně s miskovitým ložem paty se léčí vzniklé ploché nohy — zřícené klenby jsou zvednuty na anatomicky správnou výšku, což může snížit nebo odstranit obtíže a pomoci zabránit recidivě.

#### **Upozornění**

Vhodné k léčbě již existujících potíží u osob všech věkových kategorií vykonávajících pravidelnou práci ve stoje. Společnosti SanusMed není znám vliv tělesné hmotnosti na účinnost či bezpečnost pomůcky, v případech extrémní nadváhy vyžaduje použití pomůcky zvýšené sledování specialistou. Doporučujeme nosit vložku spolu s ponožkami, aby se předešlo možnému podráždění kůže.

#### **Čištění a údržba**

Čistěte perforovaný svrchní díl vložky mírně navlhčeným hadříkem s jemným čisticím prostředkem, poté osušte suchým hadrem. Nevystavujte radiálnímu (sálavému) teplu, může dojít k deformaci.

#### **Další informace**

Obsah balení: 1 pár vložek se sendvičovou strukturou a 1× návod k použití.

Podmínky skladování: Nevystavovat radiálnímu teplu ani přímému slunečnímu záření. Zamezte kontaktu s rozpouštědly.

Nežádoucí účinky: V počáteční fázi může vložka výrazně zvýšit výšku zřícených kleneb, což může způsobit nepohodlí. V takovém případě přerušete používání a konzultujte stav s ošetřujícím lékařem.

Údržba / likvidace: Vložka nevyžaduje speciální údržbu. Po uplynutí doby použitelnosti lze opotřebovanou vložku zlikvidovat jako komunální odpad.

Forgalmazó: Jónás Kft. H-1038 Budapest, Ürömi út 10.  
Mobil: (00-36)20286-8855 Tel/Fax: (00-36-1) 240-3720  
E-mail:jonas.kft@t-online.hu