

Sanomed®

SANOMED **EpiSan Sport**

Sportovní bandáž lokte.



www.sanomed.cz



Návod k použití EpiSan Sport

Děkujeme, že jste si vybrali naši bandáž. Tento návod vám pomůže správně používat a udržovat pásku pro dosažení nejlepších výsledků.

Informace o účelu použití

Bandáž EpiSan Sport je navržena pro podporu a kompresi v oblasti loketního kloubu při sportovních aktivitách a lehkých přetíženích. Pomáhá snížit přecitlivělost měkkých tkání, stabilizovat kloub a podpořit regeneraci při námaze a profylakticky při riziku přetížení (např. tenisový loket, golfový loket — vždy konzultujte s lékařem). Bandáž je určena pro dospělé a dorost.

Kontraindikace:

V současné době nejsou známy.

Před použitím si přečtete všechny bezpečnostní pokyny:

- nepoužívejte pásku na otevřené rány nebo podrážděnou pokožku
- pokud pocítíte bolest, nepohodlí nebo jiné nežádoucí účinky, přestaňte bandáž používat a poraďte se s lékařem

Pokyny k nasazení / sundání

Před prvním použitím zkontrolujte, zda je bandáž čistá a nepoškozená.

Nasazení:

1. Pro snadnější nasazení přehněte horní část bandáže
2. Uchopte loketní bandáž za horní část a navlečte bandáž tak daleko přes loket, až loketní ohbí leží uprostřed vpletené komfortní zóny a šev probíhá středem nad zadním kostním výběžkem.
3. Pak přehněte horní část bandáže zase zpět.
4. Bandáž sedí správně, když je komfortní zóna uprostřed loketního ohbí.
5. Bandáž je možné nosit na levé i pravé ruce

Sundání pásky:

Přehněte horní část bandáže a stáhněte ji z ruky.

Údržba a čištění:

- Používejte jemný prací prostředek, doporučujeme používat sítku na praní.
- Bandáž nevystavujte přímému působení tepla a chladu.
- Respektujte pokyny k péči všitě na etiketě na produktu.
- Perte v ruce nebo pračce na 30°C.
- Používejte jemný prací prostředek.
- Nepoužívejte agresivní čisticí prostředky nebo bělidla
- Pravidelná péče zaručuje optimální účinek.
- Nežehlete a nesušte v sušičce.

Skladování a likvidace

- Skladujte v suchu při pokojové teplotě mimo přímé sluneční záření.
- Likvidujte v souladu s místními pravidly pro směsný plast/textil. Pokud je výrobek kontaminovaný biologickým materiálem, likvidujte dle platných hygienických předpisů.


Praktická doporučení:

Nejlepší efekt má bandáž při aktivitě; lze ji nosit celodenně, ale při dlouhém sezení či spánku ji doporučujeme sundat.

U pacientů s cévními poruchami, diabetem, citlivou kůží nebo u dětí doporučujeme individuální konzultaci s lékařem či fyzioterapeutem před zahájením pravidelného nošení.



Video návod zde:

 <p>SANOMED, spol. s r.o. Palackého třída 240/75 612 00 Brno Czechia</p>	<p>MD Medical Device (Zdravotnický prostředek)</p> <p>Materiálové složení: polyester/elastan</p>	<p>Ohlašovací povinnost: Závažné nežádoucí příhody, definované ve článku 2 (č. 65) nařízení (EU) 2017/745 (MDR), je třeba nahlásit výrobci a příslušnému úřadu členského státu.</p>
---	---	--